

# RELATÓRIO TÉCNICO

## BIOXI

### Extensão para aspiração, irrigação, drenagem e condução de líquidos.

MS.:803.306.300.02

#### MARCA



#### FABRICANTE

**BIOTEC PROD HOSP LTDA**  
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –  
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000  
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:  
433.097.131.111  
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000  
E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

#### **Composição:**

Extensão em PVC Flexível, isento de látex, conector graduado, flexível em suas extremidades.

Opcionais: Conectores/conector união (1/4x1/4), comprimento e diâmetro da extensão.

#### **Indicação:**

Extensão Aspiração PVC: para irrigação, aspiração, drenagem e condução de líquido e gases em procedimentos médicos.

Extensão Oxigenoterapia PVC: para procedimentos com oxigênio ou outros gases medicinais.

#### **Apresentação:**

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

#### **Instrução de Uso (Aspiração):**

- Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso.
- Conectar a extensão ao aspirador para aspiração, quando produto de aspiração.
- O produto deve ser manuseado somente por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas de utilização.
- Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Não reutilize a extensão.
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

#### **Instrução de Uso (Oxigenoterapia):**

- Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso.
- Conectar a extensão a rede de gases para utilização, quando produto de oxigenoterapia.
- O produto deve ser manuseado somente por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas de utilização.
- Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Não reutilize a extensão.
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

**Advertência:**

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESTRUIR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL.

Imagem:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOXI 2.0 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 2m de comp. com diâmetro interno de 8mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.002
BIOXI 3.0 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 3m de comp. com diâmetro interno de 8mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.001