

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOXI

Extensão para aspiração, irrigação, drenagem e condução de líquidos.

MS.:803.306.300.02

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD HOSP LTDA

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:
433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Extensão em PVC Flexível, isento de látex, conector graduado, flexível em suas extremidades.
Opcionais: Conectores/conector união (1/4x1/4), comprimento e diâmetro da extensão.

Indicação:

Extensão Aspiração PVC: para irrigação, aspiração, drenagem e condução de líquido e gases em procedimentos médicos.
Extensão Oxigenoterapia PVC: para procedimentos com oxigênio ou outros gases medicinais.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

Instrução de Uso (Aspiração):

- Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso.
- Conectar a extensão ao aspirador para aspiração, quando produto de aspiração.
- O produto deve ser manuseado somente por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas de utilização.
- Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Não reutilize a extensão.
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

Instrução de Uso (Oxigenoterapia):

- Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso.
- Conectar a extensão a rede de gases para utilização, quando produto de oxigenoterapia.
- O produto deve ser manuseado somente por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas de utilização.
- Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
- Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- Não reutilize a extensão.
- Produto de Uso Único – Destruir após o uso.

Advertência:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.
DESTRUIR APÓS O USO.
PRODUTO ESTÉRIL.

Imagens:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOXI 1.5 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 1.5m de comp. com diâmetro interno de 5mm e externo em 7mm – conector graduado.	00.02.020
BIOXI 2.0 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 2m de comp. com diâmetro interno de 5mm e externo de 7mm – conector graduado	00.02.039
BIOXI 3.0 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 3m de comp. com diâmetro interno de 5mm e externo de 7mm – conector graduado	00.02.050
BIOXI 4.0 ASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 4m de comp. com diâmetro interno de 5mm e externo de 7mm – conector graduado	00.02.014
BIOXI 2.0 ASPIRAÇÃO (4,5)	Tubo em PVC cristal com 2m de comp. com diâmetro interno de 4,5mm e externo de 6,5mm – conector elastômero	00.02.005
BIOXI 3.0 ASPIRAÇÃO (4,5)	Tubo em PVC cristal com 3m de comp. com diâmetro interno de 4,5mm e externo de 6,5mm – conector elastômero	005.02.009
BIOXI 1.5 OXIGENOTERAPIA	Tubo em PVC verde com 1.5m de comp. com diâmetro interno de 4mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.008
BIOXI 2.0 OXIGENOTERAPIA	Tubo em PVC verde com 2m de comp. com diâmetro interno de 4mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.011
3BIOXI 2.0 OXIGENOTERAPIA	Tubo em PVC verde com 3m de comp. com diâmetro interno de 4mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.010
BIOXI 6.0 OXIGENOTERAPIA	Tubo em PVC verde com 6m de comp. com diâmetro interno de 4mm e externo de 6mm – conector graduado	00.02.016
BIOXI 4.0 LP - LIPOASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 4m de comp. com diâmetro interno de 6mm e externo de 11mm – conector elastômero	00.02.021
BIOXI 2.0 LP - LIPOASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 2m de comp. com diâmetro interno de 6mm e externo de 11mm – conector elastômero	00.02.023
BIOXI 4.0 LP - LIPOASPIRAÇÃO	Tubo em PVC cristal com 4m de comp. com diâmetro interno de 8mm e externo de 14mm – conector elastômero	00.02.024