


FICHA TÉCNICA
Active Life® Bolsa de Colostomia / Ileostomia

Nome Genérico	Sistema de uma peça drenável e pré-cortada para colostomia / ileostomia
Nome Comercial	Active Life® Bolsa de Colostomia / Ileostomia de Uma Peça
Imagem	
Descrição	As bolsas Active Life® são dispositivos de uma peça para colostomia/ileostomia compostas por uma barreira protetora de pele Stomahesive® e uma bolsa coletora drenável. As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.
Marca	Active Life® ConvaTec® Stomahesive®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composição do Produto	<p>Bolsa Coletora: Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos. As bolsas para ileostomia e colostomia apresentam ainda uma tela externa perfurada de polietileno com acetato de vinila, fixada sobre a superfície da bolsa que fica em contato com a pele.</p> <p>Barreira Protetora da Pele Stomahesive®: Composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele) e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. A borda microporosa adesiva flexível que circunda a placa adesiva é composta por uma tela de poliéster com adesivo acrílico de grau médico.</p> <p>Clipe de Fechamento: Polipropileno.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • Opção de bolsa transparente: Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens. • Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. • Bolsas opacas • A borda microporosa adesiva flexível elimina a necessidade de utilizar adesivos adicionais. • A tela perfurada fixada à parte posterior da bolsa impede o acúmulo de umidade, permitindo a respiração da pele e aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.</p>

