




Agulhas BD Vacutainer® Eclipse™

As agulhas BD Vacutainer® Eclipse™ são agulhas para coleta de sangue a vácuo com um exclusivo dispositivo de segurança que recobre toda a agulha após seu uso. Este é ativado com um dedo, reduzindo o risco de uma punção acidental e reutilização.


Código	Descrição	Cor
368607	Agulha BD Vacutainer® Eclipse™ 32 x 8 (21G 1 1/4)	
368608	Agulha BD Vacutainer® Eclipse™ 32 x 7 (22 G 1 1/4)	

Apresentação: Caixa com 48 unidades,


Instruções de uso:

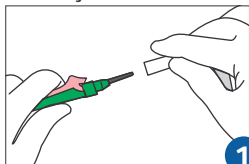


1 Retire a proteção transparente da agulha.

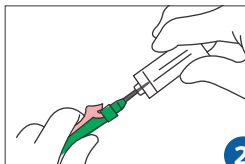


2 Rosqueie a agulha no adaptador de uso único BD Vacutainer®.

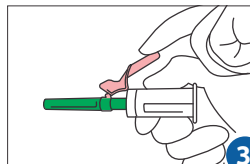


3 Levante o dispositivo de segurança e em seguida, retire a proteção da agulha.

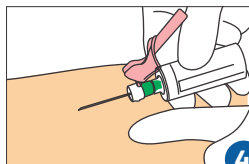

4 Observe que o bisel ficou voltado para cima. Puncione a veia do paciente.

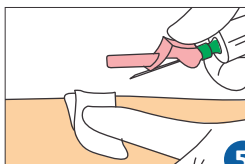

5 Após retirar a agulha da veia do paciente acione imediatamente o dispositivo de segurança com o dedo até ouvir um "clique".

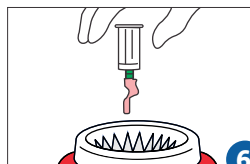

6 Descarte o conjunto em um descartador para perfurocortantes.