

RELATÓRIO TÉCNICO

BIODRIM
Coletor de Secreções e Urina
MS.: 803.306.300.10

MARCA



FABRICANTE

**BIOTEC PROD PLASTICOS E METÁLICOS
LTDA**
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão A/B –
Terra Preta
– Mairiporã / SP CEP: 07600-000
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE: 433.097.131.111
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000
E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

1. Frasco em PP, graduado a cada 50 ml, tipo ampola, capacidade 1200, extensão em PVC Flexível, saída de ar, pinça corta-fluxo, conector para sonda e alça para transporte e fixação.
2. Frasco em PP, graduado a cada 50 ml, capacidade 2000ml, tampa com rosca, anel de vedação e alça para transporte e fixação.
3. Frasco em PP, capacidade 2.700ml, tampa com rosca e anel de vedação.

Indicação:

Coleta de secreções e diurese horária (gástricas, biliares e salivares)

Apresentação:

Embalagem Primária: Saco Plástico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 6 caixas.

Instrução de Uso:

- 1 – Verificar se a embalagem e o produto apresentam-se em condições de uso.
- 2 – Abrir embalagem somente no momento do uso, com as mãos devidamente higienizadas.
- 3 – Retirar o produto da embalagem.
- 4 – Retirar a tampa do conector.
- 5 – Acoplar no material adequado para a utilização.
- 6 – Fixar o coletor de acordo com a necessidade.
- 7 – Descartar o produto após o uso.

Precauções, restrições e advertências:




- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESTRUIR APÓS O USO.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Imagens:

		
1200ml	2000ml	2700ml

NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIODRIM 1200ml	Frasco coletor de secreções, sistema aberto, capacidade 1200ml, extensão de 1.20cm, clamp corta fluxo, conector com alça de fixação.	00.07.001
BIODRIM 2000ml	Frasco coletor de secreções, sistema aberto, capacidade 2000ml, extensão de 1.20cm, clamp corta fluxo, conector com tampa e alça de fixação.	00.07.006
BIODRIM 2700ml	Frasco coletor de secreções, sistema aberto, capacidade 2700ml, com tampa e alça de transporte.	00.07.011