

RELATÓRIO TÉCNICO

COMPRESSA NEUROCIURGICA

MS.: 803.306.300.07

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD. HOSP. LTDA

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:
433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Fibra de poliéster de extrema pureza, por processo especial de entrelaçamento com fio radiopaco.

Dimensões (mm): 13x13 – 13x25 – 13x38 – 13x70 – 13x76 – 19x19 20x70 – 25x25 – 25x76 – 30x20 – 38x38 – 76x76

Indicação:

Absorção e proteção tecidual, incluindo tecido cerebral e outros tecidos do sistema nervoso central durante o procedimento cirúrgico.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 10 unidades.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

Instrução de Uso:

- Ao abrir a embalagem certifique-se do número de compressas.
- Umedeça as compressas em soro fisiológico, antes de proceder à sua aplicação no tecido.
- Durante o ato cirúrgico o cirurgião espalha as compressas, que contém uma linha radiopaca, entre as cavidades cerebrais proporcionando assim segurança para colocar os instrumentos médicos sem lesar os nervos e tecidos.
- Após o uso do produto, faz-se necessário que sejam retiradas, as mesmas, das cavidades antes do fechamento do campo cirúrgico.
- Por medida de segurança, passar no Raio-X para certificar-se que todas foram retiradas.

Precauções, restrições e advertências:

O fio ligado à compressas destina-se somente a identificação. Este material é radiopaco de acordo com o Método de Teste F640 da ASTM. O material poderá ser visto em todas as condições radiográficas.

Adote procedimentos inseridos nas técnicas para neurocirurgias, usando sempre assepsia ao transferir a compressa para o campo estéril.

É aconselhável que o produto seja imerso em soro fisiológico estéril, antes de ser utilizado, em razão de seu poder de absorção.

Não utilizar os produtos que apresentarem suas embalagens danificadas e/ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos.

Qualquer irregularidade com o produto entrar em contato com o fabricante através do telefone:

(11) 4818-9000.

Aconselhamos o uso do produto somente por enfermeiro (a), médico ou outro profissional especializado conhecedor das técnicas de manuseio deste tipo de produto

Descartar o produto após o uso.

Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se de que o produto é adequado ao paciente.

Artigo médico hospitalar DE USO ÚNICO. Não reutilizar

Cuidados especiais:

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.

A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

Não deixe compressas no local. A não remoção das mesmas poderá ocasionar reação a corpos estranhos.

Não corte as compressas muito próximas ao local do procedimento cirúrgico. Fragmentos sem marcadores detectáveis por raio-X podem penetrar na incisão. A não detecção e remoção desses fragmentos poderão provocar reação a corpos estranhos.

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESTRUIR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL.

Imagem:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x13	00.10.001
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x25	00.10.002

COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x38	00.10.003
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x70	00.10.004
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x76	00.10.005
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 19x19	00.10.006
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 20x70	00.10.007
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 25x25	00.10.008
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 25x76	00.10.009
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 30x70	00.10.010
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 38x38	00.10.011
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 76x76	00.10.012
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 15x25	00.10.014
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x51	00.10.016
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 13x56	00.10.017
COMPRESSA	Compressa Neurocirúrgica 12x50	00.10.019