

FIXADOR

FINALIDADE: Para fixação de cânulas e tubos em pacientes.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO: Fabricado em espuma atalhada, dobrada, macia, aveludada e costurada em fio de nylon. A fixação é feita através de velcro. Produto Não Estéril.

INSTRUÇÃO DE USO:

Para Cânula: Passar o velcro da tira maior no orifício da gravata da cânula de fora para dentro; introduzir o velcro da tira menor do outro lado do orifício da gravata; passar a tira no pescoço e ajustar o comprimento de acordo com cada paciente se for necessário corte o excesso.

Para Tubo: Limpar com álcool a extremidade do tubo endotraqueal próxima ao paciente e colar o adesivo de velcro. Posicionara banda (que apresenta um orifício central) ao redor do velcro que está fixado o tubo; traga as extremidades desta banda para a nuca do paciente ajustando o fixador e sobrepondo os velcros; As extremidades da banda superior devem ser posicionadas acima das orelhas, ajustadas e fixadas na parte posterior da cabeça sobrepondo os velcros. Após o uso descarte ou reprocessse.

Tempo de Utilização: A troca deve ser efetuada de acordo com as necessidades de higienização.


PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO: Produto não estéril passível de reprocessamento, não utilizar caso a embalagem esteja danificada ou o prazo de validade vencido. O produto não causa efeitos colaterais desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso.

Armazenamento: Armazenar em local limpo e seco ao abrigo de calor.

Transporte: No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danos na embalagem e no produto.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA: 10014160038

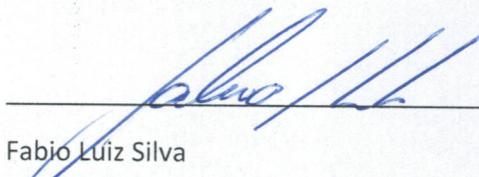

Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br