


Tegaderm™ I.V. Advanced 1685:

Técnica de Aplicação

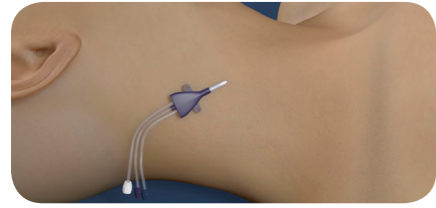


1) Prepare o local de acordo com o protocolo da instituição. Certifique-se de que a pele esteja completamente limpa e seca. Abra a embalagem de maneira asséptica e retire o fixador estéril.




2) Remova o liner para expor o adesivo e coloque o adesivo para cima em um campo estéril ou dentro da embalagem, antes de inserir o cateter.



3) Centralize o filme transparente de forma a visualizar o sítio de inserção. Posicione o fixador com a parte superior da fenda para acomodar o hub e as extensões do cateter.

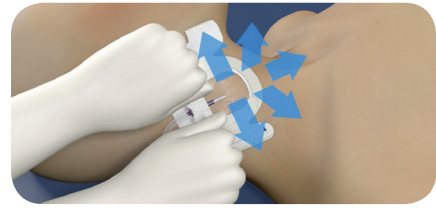

4) Aplique o fixador na pele de maneira firme e pressione suavemente o local da fita sobre o hub do cateter.

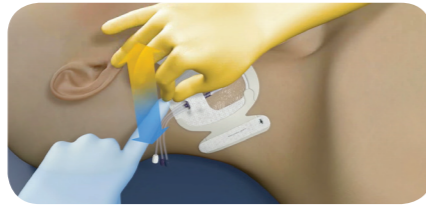

5) Retire lentamente a moldura da borda e faça pressão simultaneamente para melhor fixação.



6) Reforce o fixador com a fita larga adicional estabilizadora, após toda a cobertura estar aplicada. Alinhe a tira com a borda inferior do fixador. Comece por um dos lados até chegar ao hub. Pressione e cubra-o completamente para depois continuar a aplicação até o outro lado.



7) Aplique a fita de identificação já datada. Ela pode ser usada para estabilizar ainda mais o hub do cateter ou conforme o protocolo da instituição.



8) Pressione novamente o fixador para assegurar uma aderência ideal.

Técnica de Remoção




1) Retire a tira de estabilização do fixador.



2) Gentilmente segure a fenda, onde está localizado o hub do cateter.



3) Certifique-se de que o cateter esteja estabilizado e comece a retirar o fixador da pele lentamente.

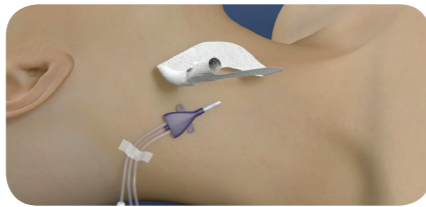

4) Retire o fixador começando pelas bordas, e retire o cateter se necessário.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br/assistenciaaopaciente
falecoma3M@mmm.com
facebook.com.br/3msolucoesparaenfermagem

Divisão de Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

Tegaderm™ I.V. Advanced



Segurança e Conforto para o Paciente



Veja o vídeo de como aplicar o Tegaderm™ Advanced

3M

3M

O Tegaderm™ Advanced é um produto de alta tecnologia, ideal para a realização de uma fixação segura avançada de cateteres. Através dessa tecnologia, a aplicação do Tegaderm™ Advanced poderá ser realizada com apenas uma das mãos e em um único movimento. Seu formato inovador conta com a incorporação da fita estabilizadora à cobertura, reforço de borda em toda sua extensão e bordas dinâmicas que se adaptam aos movimentos do paciente garantindo uma melhor adesividade e permanência da cobertura. Além disso, foi projetado para permitir e garantir uma adequada respiração da pele e atende as recomendações nacionais e internacionais mantendo os conceitos de estabilização, cobertura estéril, visualização e segurança.

	1683		1685
6,5cm x 7cm		8,5cm x 11,5cm	
100 unidades		50 unidades	

1. Novo Encaixe Arredondado:

Projetado para encaixar facilmente o hub e promover maior segurança em torno do cateter e dos tubos conectores;

2. Filme transparente estéril e permeável:

Filme transparente que permite a visualização contínua do sítio de inserção, sendo uma barreira bacteriana e viral, estéril e impermeável a contaminantes externos. Seu diferencial está no adesivo, que permite liberação rápida da umidade proporcionando maior tempo de uso e melhor fixação da cobertura;

3. Estabilização do cateter:

A fita de estabilização já incorporada à cobertura, facilitando a estabilização do hub do cateter, além de uma fita larga adicional que proporciona um reforço eficaz ao processo de estabilização;

4. Bordas flexíveis:


Tecnologia inovadora projetada para dar maior flexibilidade à cobertura, acompanhar os movimentos do paciente e reduzir assim, a elevação das bordas. Além disso, possui bordas reforçadas em toda sua extensão de tecido macio com a finalidade de promover uma melhor fixação e aumentar tempo de permanência da cobertura;

5. Fita de Identificação:

Etiqueta de identificação recoberta com filme de poliuretano.

Tegaderm™ I.V. Advanced 1683:


Técnica de Aplicação

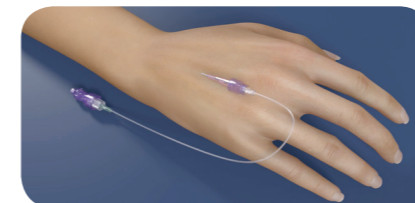


1) Prepare o local de acordo com o protocolo da instituição. Certifique-se de que a pele esteja completamente limpa e seca. Abra a embalagem de maneira asséptica e retire o fixador estéril.




2) Remova o liner para expor o adesivo e coloque o adesivo para cima em um campo estéril ou dentro da embalagem, antes de inserir o cateter.

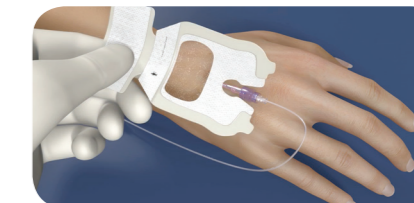


3) Segure o fixador com uma das mãos, realizando uma leve curvatura para estabilizá-lo na hora da aplicação. Centralize o filme transparente de forma a visualizar o sítio de inserção.

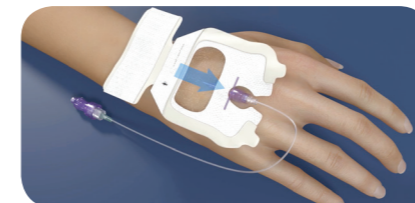

4) Posicione o fixador com a parte superior da fenda para acomodar o hub e as extensões do cateter.

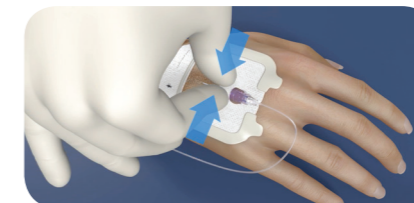


5) Aplique o fixador na pele de maneira firme e pressione suavemente o local da fita sobre o hub do cateter.

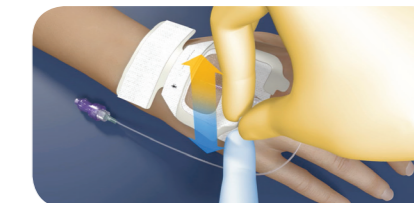


6) Retire lentamente a moldura da borda e faça pressão simultaneamente para melhor fixação.



7) Reforce o fixador com a fita larga adicional estabilizadora, após toda a cobertura estar aplicada. Alinhe a tira com a borda inferior do fixador. Comece por um dos lados até chegar ao hub. Pressione e cubra-o completamente para depois continuar a aplicação até o outro lado.

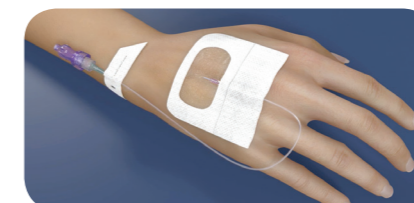

8) Aplique a fita de identificação já datada. Ela pode ser usada para estabilizar as conexões ou de acordo com o protocolo da instituição.

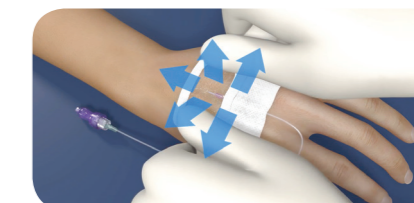

9) Pressione novamente o fixador para assegurar uma aderência ideal.

Técnica de Remoção




1) Retire a tira de estabilização do fixador.



2) Gentilmente segure a fenda, onde está localizado o hub do cateter.



3) Certifique-se de que o cateter esteja estabilizado e comece a retirar o fixador da pele lentamente.

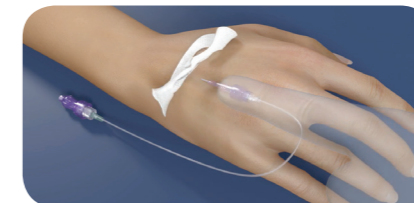

4) Retire o fixador começando pelas bordas, e retire o cateter se necessário.