



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Respiron Athletic 1

Controle: FTP-EXR-006

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 1/3

<b>FABRICANTE:</b> NCS Indústria e Comércio de Equipamentos para Saúde LTDA		
<b>REGISTRO ANVISA:</b> 10424960001	<b>NCM:</b> 9019.20.90	
<b>VALIDADE:</b> Indeterminada	<b>GARANTIA:</b> 3 meses	
<b>SIMPRO:</b> 172874	<b>CÓDIGO DO PRODUTO:</b> RE1004	
<b>EAN DO PRODUTO:</b> 7898906239098	<b>CAIXA DE EMBARQUE:</b> 31 x 24 x 17cm com 6 unidades	

## 1 DESCRIÇÃO

O exercitador e incentivador respiratório Respiron foi desenvolvido visando o fortalecimento da musculatura inspiratória, entre eles o principal músculo, o diafragma.

Indicado para pessoas sedentárias, pré e pós-operatórios (especialmente bariátricas, abdominais e torácicas), tratamento de atelectasias e portadores de doenças pulmonares como DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica) e asma. Produto livre de prescrição médica.

O produto é transparente e possui três colunas de esferas com cores diferentes que, quando em movimento, tornam o exercício lúdico permitindo constatação da evolução do treinamento.

Na base da primeira coluna possui um anel regulador, numerado de zero a três, permitindo aumentar o esforço assim que vencido o desafio do nível anterior e assim sucessivamente. O lote pode ser visualizado gravado em relevo na embalagem e abaixo do corpo/ base de acrílico do equipamento.

O aparelho é de uso individual, não autoclavável e atóxico.

## 2 COMPOSIÇÃO

- Corpo: poliestireno cristal;
- Mangueira: polietileno;



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Respiron Athletic 1

Controle: FTP-EXR-006

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 2/3

- Bocal: polipropileno.

### 3 MODO DE USAR

- Realizar o exercício de preferência sentado ou deitado com a cabeceira em elevação;  
O exercício poderá ser feito de duas formas:
- Realizar uma expiração tranquila, uma inspiração profunda, contínua e homogênea, isto é, o tempo de inspiração não pode ser curto. As esferas devem elevar-se em movimento suave e uniforme e não bruscamente; ou;
- Realizar uma expiração tranquila, realizar uma inspiração explosiva, rápida e intensa, inspirando o maior volume de ar possível, elevando as esferas de maneira explosiva;
- A frequência para realização é de 2x ao dia com 30 repetições cada, durante 4 semanas.

### 4 LIMPEZA

O Respiron é fabricado com materiais totalmente inertes (poliestireno, polipropileno), nem mesmo qualquer tipo de cola é utilizado na fabricação, para que não sirvam de meio de cultura de bactérias. Toda montagem é feita utilizando soldagem por ultrassom.

O bocal deve ser lavado antes e após o exercício, utilizando somente detergente neutro e água corrente. A mangueira e o corpo do aparelho devem ser higienizados da mesma forma.

### 5 ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz e acondicionado sob estrados e/ou pallets.

### 6 CONTRAINDICAÇÕES

O Respiron não é recomendado para pacientes com antecedentes de pneumotórax espontâneo.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Respirom Athletic 1

Controle: FTP-EXR-006

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 3/3

#### 7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Peso: 190g;
- Corpo: 14,2cm x 13,5cm x 7cm (A x L x P);
- Mangueira: 26,6cm x 1,6cm (comprimento x diâmetro);
- Nível de esforço: Médio/alto;
- Carga liberada: 15 a 90 cmH<sub>2</sub>O;
- Regulagem do anel:
  - 0 – Fácil;
  - 1 – Leve;
  - 2 – Difícil;
  - 3 – Muito difícil.

#### 8 CONTÉM

- Respirom Athletic 1;
- Mangueira com bocal;
- Manual de uso.

IN

