

# RELATÓRIO TÉCNICO

## BIOMEG

### Coletor de Drenagem (Broncoscopia e Endoscopia)

MS.: 803.306.300.17

#### MARCA



#### FABRICANTE

**BIOTEC PROD HOSP LTDA**

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –  
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:

433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: [biotec@biotechospitalar.com.br](mailto:biotec@biotechospitalar.com.br)

#### **Composição:**

Frasco em PVC rígido, com escala graduada, com capacidade de 70ml e 120ml, tampa de rosca 2 vias, extensão em PVC cristal com 15cm de comprimento, selo d'água, etiqueta identificadora e alça para transporte e fixação.

#### **Indicação:**

Coleta de drenagem torácica, mediastinal e gástrica de líquidos do organismo em procedimentos cirúrgicos (broncoscopia e endoscopia)

#### **Apresentação:**

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 6 caixas.

#### **Instrução de Uso:**

- Verificar se a embalagem e o produto apresentam-se em condições de uso.
- Abrir embalagem somente no momento do uso, com as mãos devidamente higienizadas.
- A tampa do sistema coletor de drenagem deve ser rosqueada ao frasco coletor de modo correto e firme. Somente o correto rosqueamento possibilitará a vedação adequada para a aspiração no procedimento.
- Encaixe o material do procedimento na extensão.
- Realizar o procedimento.
- Após o término utilizar a própria extensão para fechar o sistema.
- Identificar o frasco.
- Descartar o produto após o uso.

#### **Advertência:**

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESTRUIR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL.

Imagem:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
Biomeg - Bronquinho	Frasco em PVC rígido, com escala graduada, com capacidade de 70ml, tampa de rosca 2 vias, extensão em PVC cristal com 15cm de comprimento, selo d'água, etiqueta identificadora e alça para transporte e fixação.	00.06.023
Biomeg - Bronquinho	Frasco em PVC rígido, com escala graduada, com capacidade de 120ml, tampa de rosca 2 vias, extensão em PVC cristal com 15cm de comprimento, selo d'água, etiqueta identificadora e alça para transporte e fixação.	00.06.006