

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOCENTESE

Coletor

MS.: 803.306.300.24

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD HOSP LTDA

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:

433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Composição:

Composto de frasco a vácuo 25 pol.hg capacidade de 1.000 ml, tampa de material cicatrizante (borracha natural ou elastômero termoplástico) e lacre de alumínio.

Indicação:

É indicado para aspiração e coleta de líquidos em cirurgias e ou manipulação de medicamentos sem necessidade de auxílio da rede de vácuo para aspiração.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 6 caixas.

Instrução de Uso:

Para correta utilização do produto, seguir as instruções abaixo:

1.1. Coletor Biocentese Manipulação - modelo 1

Verificar a data de validade do produto;

Verificar a integridade da embalagem;

Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso;

Verificar a compatibilidade do Frasco com o produto a ser manuseado.

1.2. Coletor Biocentese para Drenagem - modelo 2

Verificar a data de validade do produto;

Verificar a integridade da embalagem;

Abrir assepticamente a embalagem somente no momento do uso;

Retirar o lacre da tampa do frasco e conectar o material adequado para o procedimento.

Advertência:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESCARTAR EM LIXO INFECTANTE APÓS O USO.
PRODUTO ESTÉRIL.

IMAGEM:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC	
BIOCENTESE	Frasco em PVC, rígido, com vácuo interno de 25 pol.hg, capacidade 1.000 ml, tampa de material cicatrizante (borracha natural ou elastômero termoplástico), escala de graduação lateral à cada 50ml e lacre de alumínio.	00.17.002	