



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Respiron Kids

Controle: FTP-EXR-008

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 1/3

FABRICANTE: NCS Indústria e Comércio de Equipamentos para Saúde LTDA		
REGISTRO ANVISA: 10424960001	NCM: 9019.20.90	
VALIDADE: Indeterminada	GARANTIA: 3 meses	
SIMPRO: 172871	CÓDIGO DO PRODUTO: RE1000	
EAN DO PRODUTO: 7898906239180	CAIXA DE EMBARQUE: 45 x 32 x 33cm com 24 unidades	

1 DESCRIÇÃO

O exercitador e incentivador respiratório Respiron foi desenvolvido visando o fortalecimento da musculatura inspiratória, entre eles o principal músculo, o diafragma.

Indicado para pessoas sedentárias, pré e pós-operatórios (especialmente bariátricas, abdominais e torácicas), tratamento de atelectasias e portadores de doenças pulmonares como DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica) e asma. Produto livre de prescrição médica.

O produto é transparente e possui três colunas de esferas com cores diferentes que, quando em movimento, tornam o exercício lúdico permitindo constatação da evolução do treinamento.

Na base da primeira coluna possui um anel regulador, numerado de zero a três, permitindo aumentar o esforço assim que vencido o desafio do nível anterior e assim sucessivamente. O lote pode ser visualizado gravado em relevo na embalagem e abaixo do corpo/ base de acrílico do equipamento.

O aparelho é de uso individual, não autoclavável e atóxico. Indicado para crianças a partir de 4 anos.

2 COMPOSIÇÃO

- Corpo: poliestireno cristal;
- Mangueira: polietileno;



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Respiron Kids

Controle: FTP-EXR-008

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 2/3

- Bocal: polipropileno.

3 MODO DE USAR

- Realizar o exercício de preferência sentado ou deitado com a cabeceira em elevação;
O exercício poderá ser feito de duas formas:
- Realizar uma expiração tranquila, uma inspiração profunda, contínua e homogênea, isto é, o tempo de inspiração não pode ser curto. As esferas devem elevar-se em movimento suave e uniforme e não bruscamente; ou;
- Realizar uma expiração tranquila, realizar uma inspiração explosiva, rápida e intensa, inspirando o maior volume de ar possível, elevando as esferas de maneira explosiva;
- A frequência para realização é de 2x ao dia com 30 repetições cada, durante 4 semanas.

4 LIMPEZA

O Respiron é fabricado com materiais totalmente inertes (poliestireno, polipropileno), nem mesmo qualquer tipo de cola é utilizado na fabricação, para que não sirvam de meio de cultura de bactérias. Toda montagem é feita utilizando soldagem por ultrassom.

O bocal deve ser lavado antes e após o exercício, utilizando somente detergente neutro e água corrente. A mangueira e o corpo do aparelho devem ser higienizados da mesma forma.

5 ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz e acondicionado sob estrados e/ou pallets.

6 CONTRAINDICAÇÕES

O Respiron não é recomendado para pacientes com antecedentes de pneumotórax espontâneo.

7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO Respirom Kids

Controle: FTP-EXR-008	Versão: 03	Emissão: maio/2017	Página: 3/3
-----------------------	------------	--------------------	-------------

- Peso: 182g;
- Corpo: 14,2cm x 13,5cm x 7cm (A x L x P);
- Mangueira: 26,6cm x 1,6cm (comprimento x diâmetro);
- Nível de esforço: Baixo;
- Regulagem do anel:
 - 0 – Fácil;
 - 1 – Leve;
 - 2 – Difícil;
 - 3 – Muito difícil.

8 CONTÉM

- Respirom Kids;
- Mangueira com bocal;
- Adesivos;
- Manual de uso.



EXPIRANDO QUALIDADE

