

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOQUIM

Coletor de Materiais Perfuro cortantes

MS.: 803.306.300.01

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD HOSP LTDA

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão A/B –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:

433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Característica do Produto:

Frasco plástico laranja translúcido rígido (segurança contra perfurações), tampa com rosca e alça para transporte.

Fechamento hermético, evitando escape de resíduos.

Capacidade: 7 Litros

Indicação:

Coleta de materiais líquidos, sólidos quimioterápicos infectantes e perfuro cortantes.

Apresentação:

Embalagem plástica com 9 unidades.

Instrução de Uso:

- Abrir a embalagem, somente no momento do uso, e após certificar-se que a mesma não foi violada.
- Preencher o reservatório até a linha pontilhada.
- Após preenchido lacrar e encaminhar para o descarte de acordo com o protocolo da instituição.
- Mantenha distância do coletor do corpo.
- Os coletores devem ser recolhidos por veículos habilitados, pertencentes ao Serviço de Coleta de Resíduos da Saúde do município.

Precauções, restrições e advertências:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade esteja vencido.

Precauções de segurança para evitar acidentes com materiais infectantes:

Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas.

Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor.

Não jogue os materiais perfuro cortantes no lixo comum.

Não exceda o limite de enchimento do coletor.

Para descarte do coletor lacre a tampa e transporte pelas alças, afastado do corpo.

Após o uso e fechamento, acondicione o coletor em saco plástico normatizado, conforme a norma NBR 9190.

Cuidados Especiais:

Considerar o produto potencialmente infectante após o uso, devendo ser manuseados com cuidado e descartados em recipientes adequados para não haver risco de contaminação acidental.

A incineração deve ser feita por empresas especializadas atendendo aos requisitos da **ANVISA** e às normas internacionais de gestão e preservação ambiental.

Imagem:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. BIOTEC
BIOQUIM	Frasco plástico translúcido rígido, tampa de rosca e com alça para transporte. Capacidade: 7 Litros.	00.01.006
BIOQUIM SUPORTE	Suporte para Frasco de 7 litros.	70.01.006