

FICHA TÉCNICA
AQUACEL® Ag Extra Curativo Antimicrobiano de Hidrofibra com Prata e Fibra de Reforço

Nome Genérico	Curativo Antimicrobiano de Hidrofibra com Prata e Fibra de Reforço
Nome Comercial	AQUACEL® Ag Extra Curativo Antimicrobiano de Hidrofibra com Prata e Fibra de Reforço
Imagem	
Descrição	AQUACEL® Ag Extra possui dupla camada de curativo macio, estéril, que absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes na ferida, criando um gel macio e coeso, que se adapta intimamente à superfície da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico).
Marca	Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Limited – Reino Unido
Composição do Produto	AQUACEL® Ag Extra é um curativo estéril, de fibras de não tecido, composto por duas camadas de carboximetilcelulose sódica impregnado com 1,2% de prata iônica (agente microbiano), costurado com fio de tencel.
Características e Ações do Produto	<p>Os curativos AQUACEL® Ag Extra apresentam todos os benefícios da Tecnologia Hydrofiber® com poder de absorção 50% maior.</p> <p>-Tecnologia Hydrofiber®: O exsudato da ferida é administrado pelo curativo através da capacidade de absorção e gelificação da Tecnologia Hydrofiber®. A camada hidrofílica de contato com a ferida cria um gel coeso em contato com o exsudato da ferida e moldando-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer.</p> <p>-Capacidade de retenção: A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração. O poder de absorção no AQUACEL® Ag Extra é 50% maior, o que melhora o controle do exsudato e a eficiência do curativo, e é 9 vezes mais resistente, o que facilita e reduz a dor durante sua remoção.</p> <p>-Prata presente no curativo: A prata iônica incorporada no curativo mata um amplo espectro de microrganismos patógenos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos. O próprio curativo atua como uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida.</p>

Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em algumas situações AQUACEL® Ag Extra pode ser utilizado sem a supervisão de um profissional de saúde: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Abrasões, lacerações, pequenos cortes e pequenas escaldaduras e queimaduras;</i> • Nas demais situações onde há indicação de AQUACEL® Ag Extra, é necessária a supervisão de um profissional da saúde, são elas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Feridas, queimaduras de profundidade parcial (segundo grau), úlceras de pé diabético, úlceras de perna (úlceras de estase venosa, úlceras arteriais e úlceras de perna de etiologia mista) e úlceras por pressão (profundidade parcial e total), feridas cirúrgicas deixadas para cicatrizar por segunda intenção, tais como incisões cirúrgicas deiscidas, feridas traumáticas, feridas que sangram facilmente, feridas oncológicas exsudativas, feridas dolorosas, feridas infectadas.</i> • Não deve ser utilizado em indivíduos que tenham apresentado reações alérgicas ou conhecida sensibilidade ao curativo ou algum de seus componentes. • O curativo é de uso único e não deve ser reutilizado, pois pode levar ao aumento do risco de infecção ou contaminação cruzada. • A lesão deve ser inspecionada a cada troca de curativo. • Pode permanecer no leito da lesão até no máximo 7 dias. • Para queimaduras de profundidade parcial (segundo grau) o curativo pode permanecer aplicado sobre a ferida até 14 dias ou até quando clinicamente indicado. • Este curativo deve ser utilizado em conjunto com a cobertura de um curativo secundário. 																																	
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.																																	
Registro Sanitário	Registro ANVISA: 80523020005																																	
NCM	3005.90.90																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1413 408 1447">Código ICC</th> <th data-bbox="408 1413 624 1447">Brasíndice</th> <th data-bbox="624 1413 873 1447">SIMPRO</th> <th data-bbox="873 1413 1176 1447">Característica</th> <th data-bbox="1176 1413 1474 1447">Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 1447 408 1480">420675</td> <td data-bbox="408 1447 624 1480">BR10211</td> <td data-bbox="624 1447 873 1480">265777</td> <td data-bbox="873 1447 1176 1480">5 cm X 5 cm</td> <td data-bbox="1176 1447 1474 1480">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1480 408 1514">420676</td> <td data-bbox="408 1480 624 1514">BR10212</td> <td data-bbox="624 1480 873 1514">265778</td> <td data-bbox="873 1480 1176 1514">10 cm X 10 cm</td> <td data-bbox="1176 1480 1474 1514">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1514 408 1547">420678</td> <td data-bbox="408 1514 624 1547">BR10214</td> <td data-bbox="624 1514 873 1547">265779</td> <td data-bbox="873 1514 1176 1547">15 cm X 15 cm</td> <td data-bbox="1176 1514 1474 1547">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1547 408 1581">420679</td> <td data-bbox="408 1547 624 1581">BR10215</td> <td data-bbox="624 1547 873 1581">265780</td> <td data-bbox="873 1547 1176 1581">20 cm x 30 cm</td> <td data-bbox="1176 1547 1474 1581">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1581 408 1615">403771</td> <td data-bbox="408 1581 624 1615">BR10024</td> <td data-bbox="624 1581 873 1615">265782</td> <td data-bbox="873 1581 1176 1615">Fita 2 X 45 cm</td> <td data-bbox="1176 1581 1474 1615">5</td> </tr> </tbody> </table>					Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa	420675	BR10211	265777	5 cm X 5 cm	10	420676	BR10212	265778	10 cm X 10 cm	10	420678	BR10214	265779	15 cm X 15 cm	5	420679	BR10215	265780	20 cm x 30 cm	5	403771	BR10024	265782	Fita 2 X 45 cm	5
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa																														
420675	BR10211	265777	5 cm X 5 cm	10																														
420676	BR10212	265778	10 cm X 10 cm	10																														
420678	BR10214	265779	15 cm X 15 cm	5																														
420679	BR10215	265780	20 cm x 30 cm	5																														
403771	BR10024	265782	Fita 2 X 45 cm	5																														