



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

CARACTERÍSTICAS

- Cateter ureteral em “J” de poliuretano, com as opções de extremidades: uma ponta aberta e outra cilíndrica (fechada), ou com ambas extremidades abertas, orifícios de drenagem em toda sua extensão, graduado de centímetros em centímetros, radiopaco, linha de posicionamento de cor preta;
 - Bainha empurradora em poliuretano flexível, com 45 cm de comprimento;
 - Mandril em espiral confeccionado em aço inox revestido de teflon, com extremidade de segurança flexível e ponta rígida marcada, de aproximadamente 150 cm de comprimento;
 - 2 pinças de fixação, em plástico.
- Acondicionada em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.



Ponta Fechada

Ponta Aberta

EMBALAGEM



Unitária - 550mm x 100mm



Caixa com 05unds - 40mm X 540mm x 150mm



Caixa embarque: 150unds
560mm X 460mm X 460mm



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

MEDIDAS E CALIBRES

Código	Nome	Tamanho	Ch	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Espessura da parede unilateral
94060304	CATETER DUPLO J PONTA A/F	16CM	CH3,0	0,60	1,00	0,20mm
94064804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	16CM	CH4,8	0,90	1,60	0,35mm
94180604	CATETER DUPLO J PONTA A/F	24CM	CH6,0	1,10	2,00	0,45mm
94180704	CATETER DUPLO J PONTA A/F	24CM	CH7,0	1,30	2,30	0,50mm
94180804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	24CM	CH8,0	1,60	2,70	0,55mm
94184804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	24CM	CH4,8	0,90	1,60	0,35mm
94210604	CATETER DUPLO J PONTA A/F	26CM	CH6,0	1,10	2,00	0,45mm
94210704	CATETER DUPLO J PONTA A/F	26CM	CH7,0	1,30	2,30	0,50mm
94210804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	26CM	CH8,0	1,60	2,70	0,55mm
94214804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	26CM	CH4,8	0,90	1,60	0,35mm
94240604	CATETER DUPLO J PONTA A/F	28CM	CH6,0	1,10	2,00	0,45mm
94240704	CATETER DUPLO J PONTA A/F	28CM	CH7,0	1,30	2,30	0,50mm
94240804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	28CM	CH8,0	1,60	2,70	0,55mm
94244804	CATETER DUPLO J PONTA A/F	28CM	CH4,8	0,90	1,60	0,35mm
94510604	CATETER DUPLO J PONTA A/A	26CM	CH6,0	1,10	2,00	0,45mm
94510704	CATETER DUPLO J PONTA A/A	26CM	CH7,0	1,30	2,30	0,50mm
94514804	CATETER DUPLO J PONTA A/A	26CM	CH4,8	0,90	1,60	0,35mm
94540604	CATETER DUPLO J PONTA A/A	28CM	CH6,0	1,10	2,00	0,45mm
94540704	CATETER DUPLO J PONTA A/A	28CM	CH7,0	1,30	2,30	0,50mm



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

Código	Nome	Para Tamanho	Para Ch	Tamanho	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Espessura da parede unilateral
94060304	BAINHA DE INTRODUÇÃO	16CM	CH3,0	45cms	0,60	1,00	0,20mm
94064804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	16CM	CH4,8	45cms	0,90	1,60	0,35mm
94180604	BAINHA DE INTRODUÇÃO	24CM	CH6,0	45cms	1,10	2,00	0,45mm
94180704	BAINHA DE INTRODUÇÃO	24CM	CH7,0	45cms	1,30	2,30	0,50mm
94180804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	24CM	CH8,0	45cms	1,60	2,70	0,55mm
94184804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	24CM	CH4,8	45cms	0,90	1,60	0,35mm
94210604	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH6,0	45cms	1,10	2,00	0,45mm
94210704	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH7,0	45cms	1,30	2,30	0,50mm
94210804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH8,0	45cms	1,60	2,70	0,55mm
94214804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH4,8	45cms	0,90	1,60	0,35mm
94240604	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH6,0	45cms	1,10	2,00	0,45mm
94240704	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH7,0	45cms	1,30	2,30	0,50mm
94240804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH8,0	45cms	1,60	2,70	0,55mm
94244804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH4,8	45cms	0,90	1,60	0,35mm
94510604	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH6,0	45cms	1,10	2,00	0,45mm
94510704	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH7,0	45cms	1,30	2,30	0,50mm
94514804	BAINHA DE INTRODUÇÃO	26CM	CH4,8	45cms	0,90	1,60	0,35mm
94540604	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH6,0	45cms	1,10	2,00	0,45mm
94540704	BAINHA DE INTRODUÇÃO	28CM	CH7,0	45cms	1,30	2,30	0,50mm

FICHA TÉCNICA



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

Código	Nome	Para Tamanho	Para Ch	Tamanho	D.E. (Polegada)	D.E. (mm)
94060304	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	16CM	CH3,0	150cms	0,018	0,46
94064804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	16CM	CH4,8	150cms	0,028	0,71
94180604	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	24CM	CH6,0	150cms	0,035	0,89
94180704	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	24CM	CH7,0	150cms	0,035	0,89
94180804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	24CM	CH8,0	150cms	0,035	0,89
94184804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	24CM	CH4,8	150cms	0,028	0,71
94210604	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH6,0	150cms	0,035	0,89
94210704	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH7,0	150cms	0,035	0,89
94210804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH8,0	150cms	0,035	0,89
94214804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH4,8	150cms	0,028	0,71
94240604	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH6,0	150cms	0,035	0,89
94240704	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH7,0	150cms	0,035	0,89
94240804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH8,0	150cms	0,035	0,89
94244804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH4,8	150cms	0,028	0,71
94510604	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH6,0	150cms	0,035	0,89
94510704	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH7,0	150cms	0,035	0,89
94514804	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	26CM	CH4,8	150cms	0,028	0,71
94540604	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH6,0	150cms	0,035	0,89
94540704	GUIA (MANDRIL) EM ESPIRAL	28CM	CH7,0	150cms	0,035	0,89



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

COMPOSIÇÃO

Cateter: Poliuretano com linha radiopaca;
Guia de introdução (mandril): poliuretano flexível;
Mandril em espiral: aço inox revestido de teflon;
Pinças de fixação
Isento de látex, isento de ftalato (DEHP);

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

O Cateter Ureteral Duplo J é utilizado para:

- Drenagem interna temporária da urina, pela união ureteropélvica até a bexiga;
- Para alívio da obstrução ureteral numa série de condições benignas, malignas e pós-traumáticas;
- Em casos de extravasamento urinário devido a orifícios nas vias urinárias, que podem causar dor e infecções severas, até a cicatrização do(s) orifício(s);
- Dilatação do ureter antes do procedimento de litotripsia;
- Após transplante renal, como suporte na cicatrização do ureter

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO

Produto médico que somente deve ser utilizado por médicos profissionais da área urológica. Só deverão ser utilizados os produtos que possuam suas respectivas embalagens íntegras, devendo ser descartado o uso daqueles cuja embalagem esteja aberta, danificada ou violada para que haja garantia de sua esterilização e utilização.

Antes de utilizar ler as instruções, observar as advertências e precauções necessárias a este tipo de intervenção. Verificar também eventuais outros dispositivos para uso simultâneo com o conjunto de drenagem, contra-indicações e possíveis complicações.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Ao utilizar o dispositivo, sempre use equipamento de proteção pessoal apropriado.

- Introduzir o cateter através do fio guia, evitando qualquer dobra, avance o cateter pela uretra
- Dilatar o canal da punção ao longo do fio guia através do cateter.
- Empurrar o cateter ao longo do fio guia e para a correta posição.
- Sempre observar a posição e a localização do cateter, utilizando o meio radiopaco (contraste)
- Retirar cuidadosamente o fio guia permitindo a formação espontânea de um pigtail no rim.
- Fixar o cateter no lugar.



CATETER URETERAL DUPLO J PIG TAIL, BCI MEDICAL

ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

O conjunto duplo J é fornecido estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

DESCARTE DO PRODUTO

O descarte de produtos contaminados, devem obedecer a orientação técnica de cada instituição ou empresa.

Produto de uso único devendo ser descartado conforme legislação ambiental e sanitária vigente no país. Recomendamos a incineração do produto utilizado e contaminado, avariado ou vencido.

Para produtos passíveis de reprocessamento perante a Anvisa aplicar a RDC 15/2012.

FABRICANTE

Fabricante:

Electroplast S/A

Servando Gomez, nº 2450 Montevideo - Uruguai

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

Importador e Distribuidor:

Badeia Comércio e Importação Ltda

Rua do Hipódromo, 1465/1473 – Fone: (11) 2292.0474 – (11) 2662.0890

CEP: 03162-020 – São Paulo – SP

E-mail: badeia@badeia.com.br

Site: www.badeia.com.br

Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

Registro ANVISA: 10297020026