



## Luva Nitrílica Powder Free Descarpack

### DESCRIÇÃO

As **Lovas Nitrílicas Powder Free Descarpack** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI), não estéreis, de uso único, sem pó e livres de látex, podendo ser utilizadas por pessoas que possuem alergia ao látex e ao pó. Disponíveis na cor azul, promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Lovas Nitrílicas Powder Free Descarpack** possuem certificado de aprovação (C.A) pelo Ministério do Trabalho.

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330669122  
**C.A:** 31.410  
**Fabricante:** Careglove Global SDN. BHD.

**Cadastro Anvisa:** 10330660278  
**Relatório de Ensaio (RAE):** 9100919 - Lab System (CRL 0154)  
**Fabricante:** Hartalega SDN. BHD.

## INDICAÇÃO DE USO

As **Luvras Nitrílicas Powder Free Descarpack** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvras Nitrílicas Powder Free Descarpack** estão disponíveis na cor azul e nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Luva:** Copolímero de Butadieno e Acrilonitrilo.

## VALIDADE

Três (03) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
P	0433201	100 unidades	20 cartuchos
M	0433301	100 unidades	20 cartuchos
G	0433401	100 unidades	20 cartuchos

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
- ❖ Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
- ❖ Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- ❖ Calçar as luvas;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Higienizar as mãos;

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Livre de Látex;
- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Não estéril.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.