

FRASCO COLETOR DE VIAS AÉREAS

MEDIDAS: 40 E 70 ml

FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO

Produto indicado para coleta asséptica das vias aéreas.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frasco confeccionado em Poliestireno, com tampa e adaptador em Polietileno de alta densidade e tubo em Cloreto de Polivinila (PVC).

INSTRUÇÕES DE USO

As figuras abaixo ilustram as instruções de como usar o bronco coletor adequadamente.

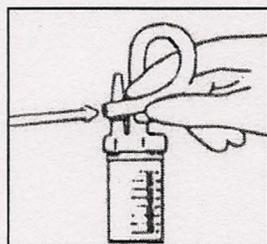


Fig 3.1. Conecte o tubo de PVC do frasco coletor ao broncoscópio ou a sonda de aspiração.

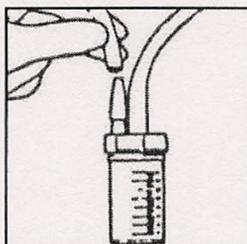


Fig 3.2. Conecte o tubo de sucção ao adaptador macho fixado na lateral da tampa do frasco bronco coletor.

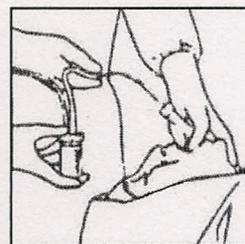


Fig 3.3. Proceda com a aspiração asséptica.

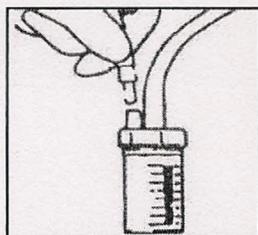


Fig 3.4. Quando a quantidade desejada de secreções for obtida, remova o adaptador macho da tampa do frasco bronco coletor com o tubo de sucção ainda encaixado.

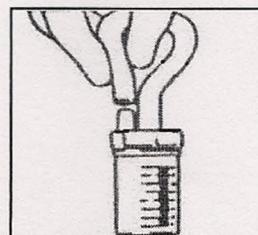


Fig 3.5. Finalmente desconecte o tubo de PVC do broncoscópio ou da sonda de aspiração e ajuste-o na abertura do prolongador fixo na lateral da tampa do frasco coletor.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Artigo médico hospitalar de uso único. Produto estéril à gás óxido de etileno.

O produto só pode ser instalado por profissional habilitado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação.

Utilizar a etiqueta avulsa que acompanha o frasco coletor para identificação do paciente e amostra coletada.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja aberta, danificada ou com prazo de validade vencido.

Armazenar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente, de acordo com a finalidade de uso.

- **VALIDADE:** 3 anos a partir da data de fabricação.
REG. MS: 10014160036


Fábio Luiz Silva
Responsável Técnico
CRBM/SP – 3940