

FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

- **APRESENTAÇÃO.**

300 ML / 500 ML

- **FINALIDADE:** Destinado à administração de soluções enterais para pacientes por sonda ou via oral.

- **ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:** Fabricado em polietileno de baixa densidade, graduado em escala de 50 ml e embalados individualmente.

- **INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:** Escolha a correta medida do frasco para o paciente; Abra a embalagem de maneira asséptica; Coloque a alimentação enteral no frasco; Após preparação, colocar a tampa e rosquear até o fechamento total; No momento da administração conecte o equipo na tampa; Pendure o frasco em um suporte de cabeça para baixo; Realize o gotejamento de acordo com a orientação médica;

- **PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:** Não utilizar caso o produto esteja danificado ou prazo de validade esteja vencido. O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado de acordo com a finalidade de uso. Aconselhamos o uso do produto somente por profissionais de saúde habilitados e especializados conhecedores das técnicas de manuseio deste tipo de produto. Descartar o produto após o uso. Não reutilize o produto. Durante o transporte e manuseio do produto, tomar todos os cuidados, para que não ocorram danos do produto e de sua embalagem. Abrir a embalagem somente no momento do uso.

- **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.**

Conservar a embalagem em local limpo, seco e ao abrigo do luz. No transporte e manuseio do produto tomar as devidas precauções para que não ocorra danos na embalagem ou no produto.

- **CONTEÚDO:** 1 unidade.

- **REGISTRO ANVISA:** 10014160054



Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP – 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.