



## Luva de Vinil sem Pó DescarpacK

### DESCRIÇÃO

As **Luvas de Vinil sem Pó DescarpacK** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI), não estéreis, isentos de pó de uso único e livres de látex.

Oferecem segurança e higiene em diversos ambientes de trabalho, promovendo uma barreira física adequada para tarefas curtas que não sejam muito abrasivas. Confeccionadas com Cloreto de Polivinila (PVC), um material sintético, que traz maior conforto e sensibilidade ao tato.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Vinil sem Pó DescarpacK** possuem certificado de aprovação (C.A) pelo Ministério do Trabalho.

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330660147  
**C.A:** 36.683  
**Fabricante:** Bytech (Dongtai) Co., Ltd.

**Cadastro Anvisa:** 10330669090  
**C.A:** 38.625  
**Fabricante:** Jiangsu Jaysun Glove Co. Ltd.

### INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas Vinil sem Pó DescarpacK** oferecem segurança e higiene em diversos ambientes de trabalho, promovendo uma barreira física adequada para tarefas curtas e rápidas que não sejam muito abrasivas. As luvas de vinil protegem a

pele das mãos íntegras dos profissionais de diversas áreas, incluindo nutrição, estética e saúde, quando não houver contato com fluidos biológicos. Também podem ser utilizadas em casos contaminação do ambiente (ruptura, derrame, entre outros) de medicamentos em hospitais e clínicas.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvas de Vinil sem Pó Descarpack** estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
P	230 mm	85 ± 5 mm
M	230 mm	95 ± 5 mm
G	230 mm	105 ± 5 mm

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Luva:** PVC (Policloreto de Vinila);

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
P	0541101	100 unidades	20 cartuchos
M	0541201	100 unidades	20 cartuchos
G	0541301	100 unidades	20 cartuchos

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;
- ❖ Lavar, secar as mãos e proceder com a antisepsia das mesmas;
- ❖ Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- ❖ Calçar as luvas;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Higienizar as mãos;

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Livre de Látex;
- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Não estéril.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.