



RELATÓRIO TÉCNICO

COLAR CERVICAL DE RESGATE



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas acidentadas e politraumatizadas.

2. INDICAÇÃO: Produto destinado a imobilização da coluna cervical. Possui apoio mentoniano e occipital. Sua ampla abertura frontal permite checar o pulso carotídeo e realizar procedimentos de traqueostomia. Aberturas na parte posterior proporcionam a ventilação do local e permitem verificar o escoamento de fluidos, tais como o sangue.

Disponível nos tamanhos Neonatal, Infantil, PP, P, M, G E GG.

3. APRESENTAÇÃO: Polietileno, E.V.A, Velcro, botões de nylon.

- Conjunto formado por peça única branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima;
- Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular;
- Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas;
- Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue;
- Totalmente radiotransparente;
- Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.

4. INSTRUÇÕES PARA O USO:

- Manter a vítima com a cabeça em posição neutra;
- Verifique com seus dedos, a altura do pescoço que corresponde a distância entre uma linha imaginária que passa pela borda inferior da mandíbula e outra que passa pelo ponto onde termina o pescoço e se inicia o ombro.
- Verifique a altura (tamanho) do colar cervical, calculando a distância entre o pino preto de fixação, até a borda rígida do colar. Não inclua na medida a borda macia.
- Escolha o colar que tiver esta altura igual a altura do pescoço.
- Coloque o colar.

5. CUIDADOS: As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

7. PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação.

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O SEU USO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.

CNPJ: 47.507.520/0001-59– Ind. Brasileira. Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441-2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br