

TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE

FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: Utilizado para a manutenção da respiração em pacientes que necessitem de uma abertura cirúrgica para o acesso do ar permitindo a ventilação.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tubo com filete radiopaco e gravata: Fabricados em cloreto de polivinila (PVC) atóxico. Anel: Fabricado em poliacetal atóxico. Suporte para cadarço: Fabricado em polietileno de alta densidade atóxico. Cadarço: 90% algodão e 10% poliéster.

Nº	Calibre	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mm)	Comprimento do tubo (mm)
3,0	14	3,0	4,7	47,0
3,5	16	3,5	5,3	47,0
4,0	18	4,0	6,0	47,0
4,5	20	4,5	6,6	47,0
5,0	22	5,0	7,6	47,0
6,0	27	6,0	8,8	62,5
6,5	28	6,5	9,3	62,5
7,0	30	7,0	10,0	73,0
7,5	32	7,5	10,8	73,0
8,0	33	8,0	11,2	90,0
8,5	35	8,5	11,7	90,0
9,0	36	9,0	12,5	99,5
10	39	10	13,6	100,0

INSTRUÇÃO DE USO: Abrir a embalagem, após a verificação da sua integridade; Proceda a intubação e extubação conforme técnicas profissionais.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO. Produto estéril a Óxido de Etileno; Artigo médico hospitalar de uso único; Só pode ser instalado por profissional habilitado, a técnica de introdução faz parte de sua área de atuação; Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou o prazo de validade esteja vencido; Reprocessamento proibido. Armazenar a embalagem em local limpo e seco ao abrigo da luz; Destruir após o uso, descartando em local próprio para materiais contaminados; Em caso de dúvidas quanto a utilização e manuseio do produto, entrar em contato com a empresa. **Efeitos indesejáveis:** O produto não causa efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente, de acordo com a finalidade de uso.

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação.

REGISTRO ANVISA: 10014160037



Fabio Luiz Silva

Responsável Técnico

CRBM/SP 3940

Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Indústria Brasileira
Rua Vieira Portuense, 760 - Jardim Oriental - CEP: 04347-080 - São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263
www.cplmedicals.com.br - cplmedicals@cplmedicals.com.br