

**FINALIDADE**

Utilizada em condições decorrentes de traumas que necessitam de uma abertura cirúrgica para o acesso de ar e manutenção da respiração.

**APRESENTAÇÃO**

Nº	Calibre em FR	Diâmetro externo	Comprimento do tubo
3,0	14	4,7mm	47,0mm
3,5	16	5,3mm	47,0mm
4,0	18	6,0mm	47,0mm
4,5	20	6,6mm	47,0mm
5,0	22	7,6mm	62,5mm
5,5	24	8,0mm	62,5mm
6,0	27	8,8 mm	62,5mm
6,5	28	9,3 mm	62,5mm
7,0	30	10,0 mm	73,0mm
7,5	32	10,8 mm	73,0mm
8,0	33	11,2 mm	90,0mm
8,5	35	11,7 mm	90,0mm
9,0	36	12,5 mm	99,5mm
9,5	38	13,0 mm	99,5mm
10,0	39	13,6 mm	100,0mm

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO**

- ✓ Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico esterilizado a oxido de etileno;
- ✓ Tubo em PVC (Cloro de Polivinila) com filete radiopaco para melhor visualização, superfície lisa e ponta arredondada;
- ✓ Apresenta haste de PVC de fixação (gravata) identificada com as dimensões do tubo e o fabricante;
- ✓ Cadastrar em algodão para melhor fixação da gravata ao paciente.

**INSTRUÇÕES DE USO**

- ✓ Abrir a embalagem após a verificação da sua integridade;
- ✓ Proceda a intubação e extubação conforme técnicas profissionais.

**PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO**

- ✓ Artigo Médico Hospitalar de uso único;
- ✓ Proibido reprocessar;
- ✓ Destruir após uso;
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado, a técnica de introdução faz parte de sua área de atuação;
- ✓ A escolha do tamanho do tubo deve ser medida pelo profissional por sensibilidade;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- ✓ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizados de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

**ARMAZENAMENTO**

- ✓ Armazenar em local limpo, fresco, seco e ao abrigo da luz e livre de contaminação.

**TRANSPORTE**

- ✓ Transportar em local limpo, fresco, seco e arejado, tomar os devidos cuidados para não causar danos à embalagem e ao produto.

Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM/SP3940

**Indústria genuinamente nacional, sinônimo de entrega garantida.**

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 43.512.870/0001-52 - Industria Brasileira  
Rua Vieira Portuense, 760 – Jardim Oriental - CEP: 04347-080 – São Paulo/SP - SAC: (11) 5011-7263  
www.cplmedical.com.br - cplmedical@cplmedical.com.br