

<b>FABRICANTE:</b> POWERBREATHE INTERNATIONAL LTD - REINO UNIDO		
<b>REGISTRO ANVISA:</b> 81001390003	<b>NCM:</b> 9019.10.00	
<b>VALIDADE:</b> Indeterminada	<b>GARANTIA:</b> 12 meses	
<b>SIMPRO:</b> 261932	<b>CÓDIGO DO PRODUTO:</b> PB2000	
<b>EAN DO PRODUTO:</b> 7898966741005	<b>CAIXA DE EMBARQUE:</b> 10 unidades	

## 1 DESCRIÇÃO

O POWERbreathe foi adotado por profissionais médicos como um aparelho para treinamento muscular respiratório. Por ser cientificamente comprovado para fortalecer os músculos inspiratórios, vêm sendo utilizado tanto como uma terapia individual ou em conjunto com a reabilitação pulmonar. Possui níveis de resistência de acordo com cada modelo e que pode ser ajustado manualmente.

O POWERbreathe Plus Medic é a 2ª geração da linha, é mais anatômico e leve, possui 10 níveis de ajuste. Produto para uso individual e possui bocal esterilizável.

É indicado para uso de terapia no tratamento de patologias respiratórias, como:

- Capacitador de treinamento funcional inspiratório;
- Portadores de DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Insuficiência cardíaca;
- Asma;
- Pós-operatório de cirurgia torácica;
- Auxílio no desmame de ventilação mecânica;
- Tratamento da fibrose cística e da doença neuromuscular.

## **2 COMPOSIÇÃO**

- Bocal: PVC sem látex;
- Válvula: Borracha de silicone;
- Anilha: Borracha nitrílica;
- Mola: Aço inoxidável;
- Tensor: Nylon reforçado 66;
- Bolsa de fecho: PVC;
- Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de ajuste de carga e mola para nariz: Polipropileno.

## **3 MODO DE USAR**

- a) Encaixe do bocal nos lábios para realizar as sessões de treinamento;
- b) Realizar uma expiração esvaziando totalmente o pulmão. Para ganho de força, o padrão de inspiração deve ser rápido e prolongado, por 30 repetições 2 x ao dia;
- c) Em paciente debilitado orientamos o exercício por um tempo determinado, respirando tranquilamente;
- d) Tornando-se fácil o exercício, basta ajustar o nível que aumentará a carga.

## **4 LIMPEZA**

O equipamento é completamente lavável. A higiene pode ser realizada utilizando detergente neutro e água corrente e/ou com pastilhas higienizadoras.

## **5 ARMAZENAGEM**

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz.

**6 CONTRAINDICAÇÕES**

O POWERbreathe não é recomendado para pacientes com antecedentes de pneumotórax espontâneo.

**7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- Peso: 155g;
- Dimensões: 15,5 cm x 16,5 cm x 7 cm (A x L x P);
- Nível de escorço: leve;
- Carga liberada: 9 a 78 cmH<sub>2</sub>O.

Níveis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carga liberada	3	9	16	23	36	43	50	57	64	71	78
	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O	cmH <sub>2</sub> O

**8 CONTÉM**

- POWERbreathe Plus Medic;
- Clip nasal;
- Bolsa protetora;
- Manual do usuário.