


ATRAUMAN SILICONE

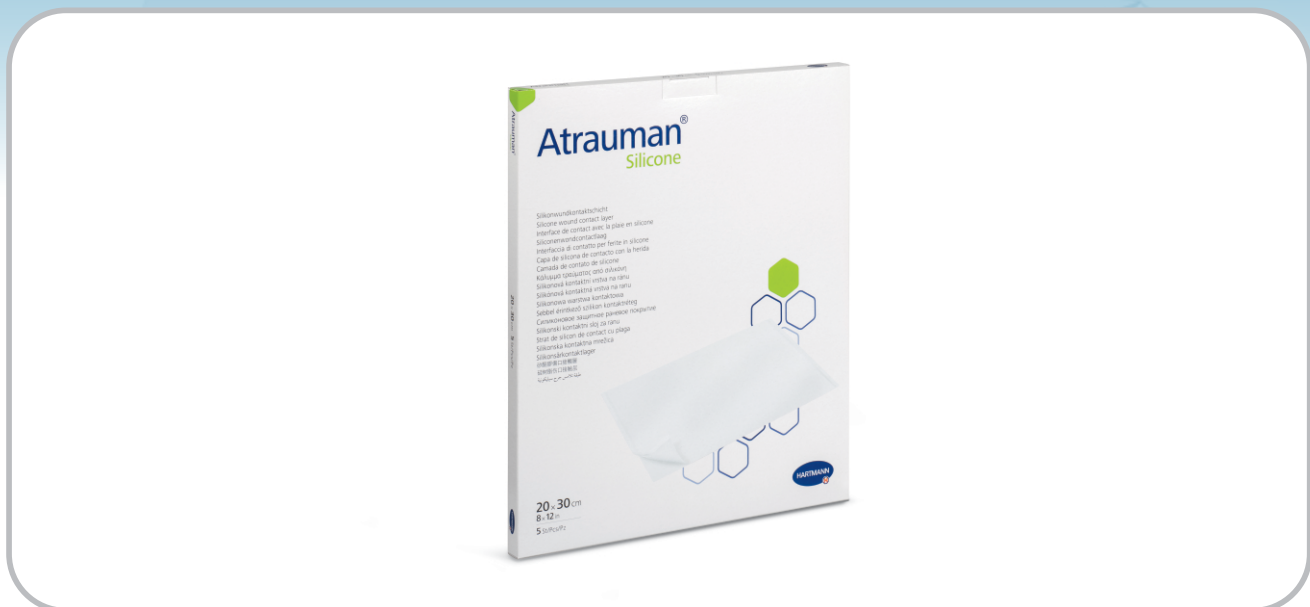

Descrição

Curativo fino, suave, maleável, não aderente composto por malha de polietileno revestida por gel de silicone em ambos os lados. Indicado para o tratamento atraumático de feridas superficiais agudas ou crônicas de diversas etiologias e em combinação com a Terapia de Feridas por Pressão Negativa, especialmente em áreas com estruturas nobres presentes.

Composição

A camada de contato com a ferida é constituída por uma rede de tereftalato de polietileno, revestida de ambos os lados por um gel de silicone (à base de polidimetilsiloxano).

Mecanismo de ação

A camada de silicone adere de forma suave e segura às superfícies secas, mas não às superfícies úmidas. Deste modo evita a aderência à ferida, e o penso pode ser retirado praticamente sem dor. A camada de contato com a ferida adapta-se à estrutura da pele de forma que, durante a sua remoção, não sejam retiradas quaisquer células cutâneas, evitando assim que se sinta dor. Em combinação com um penso secundário, ou com o sistema de tratamento de pressão negativa Vivano, a camada de contato com a ferida torna a mudança de penso atraumática e indolor.

Indicação

O Atrauman Silicone é indicado para:

- O tratamento de todo o tipo de feridas superficiais, agudas e crônicas, pouco ou moderadamente exsudativas.
- Combinação com o sistema de Terapia de Feridas por Pressão Negativa Vivano, especialmente em zonas onde estão presentes órgãos e outras estruturas nobres.
- Camada de contato com pele frágil.

Instruções de uso

Retirar o Atrauman Silicone da embalagem com ambas as películas de proteção. Remover a película menor, aplicar esse mesmo lado sobre a ferida e em seguida remover a película maior. Para absorver o exsudato da ferida, deverá ser utilizado curativo absorvente estéril

por cima do Atrauman Silicone.

Quando associado com o Vivano, Terapia de Feridas por Pressão Negativa, o Atrauman Silicone deve ser aplicado diretamente no leito da ferida.

Tempo de troca

Quando utilizado em associação com o Vivano, realizar a troca juntamente com a espuma VivanoMed Foam. Em outros casos, pode permanecer por até 7 dias mediante a avaliação do leito da ferida.

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Precauções

Avaliar a ferida, a cada 3 dias, para verificar o eventual crescimento de tecido para dentro do curativo. Manter fora do alcance de crianças.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco e com uma temperatura inferior a 30°C. Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada. Não reesterilizar. O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Óxido de etileno

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310071

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

Código	Tamanho do Produto	Quantidade por caixa
499561-0	10 x 7,5 cm	5
499563-0	10 x 20 cm	5
499565-0	20 x 30 cm	5

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

