

HYDROTAC



Descrição

Hydrotac é uma cobertura de espuma revestida na face externa com uma camada de poliuretano semipermeável e na face interna, em contato com o leito da ferida, com uma camada de hidrogel. Tecnologia exclusiva aquaclear gel.

Composição

Espuma de poliuretano, camada de poliuretano semipermeável, e hidrogel. O formato comfort e sacral apresenta borda de adesivo acrilato.

Mecanismo de ação

O Hydrotac absorve o exsudato e simultaneamente libera umidade para o leito da ferida, criando um ambiente úmido para estimular a cicatrização. O curativo não adere ao leito da ferida proporcionando uma remoção atraumática.

Indicação

Hydrotac é indicado para o tratamento de feridas planas e superficiais nas fases de granulação e epitelização com pouco a moderado exsudato.

Instruções de uso

Escolher o tamanho do Hydrotac de forma que este exceda cerca de 2 centímetro das bordas da ferida.

Hydrotac: Retirar a película branca seguindo a numeração (1 e 2) e aplicar a cobertura com o lado revestido de hidrogel sobre o leito da ferida.

Hydrotac Comfort/ Sacral: Retirar a película branca seguindo a numeração (1 e 2) e aplicar a cobertura com o lado revestido de hidrogel sobre o leito da ferida, pressionando bem a borda adesiva. Em seguida retirar a cobertura de acordo com a numeração (3 e 4).

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Precauções

Não utilizar o Hydrotac em conjunto com agentes de oxidação como soluções de água oxigenada, uma vez que podem danificar a cobertura.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco e com uma temperatura inferior a 40°C e ao abrigo da luz solar direta.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Radiação

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310061

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HydroTac

| CÓDIGO | TAMANHO DO CURATIVO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|----------|---------------------|----------------------|
| 685832-9 | 10X10 cm | 10 |
| 685833-9 | 10X20 cm | 3 |
| 685839 | 15X15 cm | 3 |
| 685844-9 | 20X20 cm | 3 |

HydroTac Comfort

| CÓDIGO | TAMANHO DO CURATIVO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|----------|---------------------|----------------------|
| 685808-8 | 8X8 cm | 10 |
| 685815-8 | 12,5 X 12,5 cm | 10 |
| 685817-1 | 15X15 cm | 3 |

HydroTac Sacral

| CÓDIGO | TAMANHO DO CURATIVO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|--------|---------------------|----------------------|
| 685827 | 18 X 18 cm | 10 |

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

