

# PUTTER FLEX



## Descrição

Atadura bielástica de curto estiramento, particularmente fina, extensibilidade longitudinal de aproximadamente 90%, extensibilidade transversal de aproximadamente 40%. Fornece alta pressão de trabalho com leve pressão de repouso. Pode ser lavada a 95 ° C e esterilizada (vapor 134 ° C).

## Indicação

A pressão exercida pela bandagem atua sobre a musculatura e veias, auxiliando no retorno venoso e prevenindo o edema e a dor ocasionada pelo refluxo sanguíneo. Indicado nos casos após esclerose de varizes, linfedema, insuficiência venosa, úlceras venosas dentre outros.

## Contra - indicações

Pacientes com oclusão arterial, insuficiência cardíaca descompensada, ITB (Índice Tornozelo-Braqual) maior que 1,3; úlceras de origem arterial, incompatibilidade com o material e disfunção sensorial pronunciada nas extremidades inferiores.

## Composição

100% Algodão.

## Apresentação

Tamanho 5 m x 10 cm embaladas individualmente.

## Instruções de uso

A bandagem deve começar a ser aplicada a partir da região plantar, calcanhar, tornozelo e continuar subindo em forma espiral pela perna, sobrepondo a bandagem sobre a volta anterior em cerca de 50% de sua largura. Ao atingir aérea abaixo do joelho prender a bandagem com fita adesiva. Não utilizar os grampos presentes na embalagem para prevenir lesões de pele.

## Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

**Código: 931829**

**Validade: 5 anos.**

**Fabricante: Paul Hartmann AG – Alemanha.**

**Registro Anvisa: 80170310062**

**Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308**

## HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar  
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP  
Telefone: (11) 3168-0226  
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

