

FICHA TÉCNICA
ESTEEM® PLUS BOLSA DE OSTOMIA DE UMA PEÇA

Nome Genérico	Bolsa de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia
Nome Comercial	Esteem® Plus Bolsa de Ostomia de Uma Peça
Imagem	
Descrição	As bolsas Esteem® Plus são dispositivos de uma peça para ostomia, compostos de uma bolsa coletora e uma placa adesiva protetora de pele. As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes. Sobre a superfície das bolsas está fixada uma tela protetora que permite a transpiração da pele e aumenta o conforto. As bolsas possuem também filtro de carvão embutido.
Marca	Esteem® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Dominican Republic Inc. – República Dominicana
Composição do Produto	<p>Bolsas coletoras: filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de vinilileno (EVA), as bolsas possuem ainda filtro composto de carvão ativado e laminado de membrana médica embutido na parte anterior superior da bolsa e protegido do contato direto com o efluente por meio de um filme de polietileno.</p> <p>Painel de Conforto: tela protetora de polietileno (PE) e politereftalato de etileno (PET) fixada na superfície da bolsa em seus dois lados nas bolsas opacas e somente na superfície da bolsa que fica em contato com a pele nas bolsas transparentes.</p> <p>Fecho Invisiclose: sistema de fechamento composto por duas tiras plásticas brancas feitas de poliestireno e duas tiras plásticas serrilhadas feitas de propileno (fecho de intertravamento).</p> <p>Placas Adesivas: São moldadas utilizando-se a massa Stomahesive, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele), poliisobutileno e óleo mineral. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e o lado adesivo é protegido por um protetor de poliéster e silicone com guia de recorte impresso.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • Multi medidas: recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma. • Opção de bolsa transparente: Permite a visualização do estoma e monitoração do efluente. • Painel de conforto: Permite uma experiência confortável ao toque da bolsa com a pele. • Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e discreta para o paciente. • Filtro de carvão ativado: As bolsas apresentam filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. • Fechamento sem clip: sistema Invisiclose mais fácil e discreto para o paciente. • Para discrição total as bolsas apresentam “Lock-it-Pocket”, uma discreta abertura em formato de bolso para ocultar o fecho.

Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>1. Preparo da pele: Suas mãos e a pele ao redor do estoma devem estar limpas, secas e livres de substâncias gordurosas antes da aplicação.</p> <p>2. Preparo da bolsa: Desenhe o formato do estoma no guia de recorte impresso no protetor da placa adesiva. Corte a placa adesiva exatamente na parte externa do desenho, tomando cuidado para não cortar o plástico da bolsa. Não corte além da última linha. Alise a abertura do corte com os dedos.</p> <p>3. Colocação da bolsa: Separe as películas da bolsa para permitir a entrada de ar. Remova o protetor da placa adesiva. Centralize a abertura da placa adesiva sobre o estoma. Aplique a placa adesiva sobre a pele ao redor do estoma por 30 segundos. Use enquanto o produto estiver confortável e seguro. O tempo de uso pode variar de usuário para usuário.</p> <p>4. Fechamento da Bolsa: Dobre o fecho a partir da tira branca na extremidade até que os fechos de intertravamento fiquem sobrepostos. Pressione os fechos de intertravamento por toda a extensão até sentir que se fecharam. Se desejar, vire o bolso ao contrário para ocultar o fecho ou envolva a aba ao redor da parte de trás da bolsa.</p> <p>5. Esvaziamento da bolsa: Abra o fecho da bolsa puxando ambas as extremidades das tiras com os dedos; drene a bolsa.</p> <p>6. Cubra o filtro com o adesivo fornecido ao tomar banho, nadar, etc. Remova-o após o término da atividade.</p> <p>7. Remoção da bolsa: Começando pela parte superior, pressione levemente a pele periestomal com uma das mãos e puxe cuidadosamente a borda da placa adesiva com a outra mão, até retirar completamente a bolsa.</p>															
Cuidados de Conservação	Conservar em local seco.															
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA Nº 80523020048															
NCM	3006.91.10															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1335 378 1368">Código ICC</th> <th data-bbox="378 1335 587 1368">Brasíndice</th> <th data-bbox="587 1335 836 1368">SIMPRO</th> <th data-bbox="836 1335 1214 1368">Característica</th> <th data-bbox="1214 1335 1471 1368">Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="145 1368 378 1402">416718</td> <td data-bbox="378 1368 587 1402">BR10188</td> <td data-bbox="587 1368 836 1402">265711</td> <td data-bbox="836 1368 1214 1402">Transparente 20-70 mm</td> <td data-bbox="1214 1368 1471 1402">10 bolsas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1402 378 1435">476719</td> <td data-bbox="378 1402 587 1435">BR10189</td> <td data-bbox="587 1402 836 1435">265710</td> <td data-bbox="836 1402 1214 1435">Opaca 20-70 mm</td> <td data-bbox="1214 1402 1471 1435">10 bolsas</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa	416718	BR10188	265711	Transparente 20-70 mm	10 bolsas	476719	BR10189	265710	Opaca 20-70 mm	10 bolsas	
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa												
416718	BR10188	265711	Transparente 20-70 mm	10 bolsas												
476719	BR10189	265710	Opaca 20-70 mm	10 bolsas												