

Microcoleta



Lancetas de Segurança

As Lancetas automáticas BD dispõem de dispositivo de segurança (evita acidentes com perfurocortantes), são fáceis de usar e são praticamente indolores para o paciente.

Lancetas Contact-Activated® são destinadas para a punção digital e realização de testes POC (*Point of Care*) e/ou coleta de microtubos.

Lancetas Microtainer® Quikheel™ foram desenvolvidas especialmente para punção em calcâneo para a realização de teste do pezinho e coleta de microtubos.

Código	Descrição	Tamanho	Cor
366592	Contact-Activated® (Fluxo Baixo)	30G x 1,5mm	
366593	Contact-Activated® (Fluxo Médio)	21G x 1,8mm	
366594	Contact-Activated® (Fluxo Alto)	1,5mm x 2mm	
368100*	Microtainer® Quikheel™	1,75mm x 0,85mm	
368101*	Microtainer® Quikheel™	2,5mm x 1,0mm	

Apresentação: Caixa com 200 unidades e catálogos com (*) caixa com 50 unidades.

Instruções de uso:

Coleta de Sangue com Lancetas BD Microtainer® Quikheel™



1 Identifique a área onde será realizada a incisão (área sombreada). Assegure-se que a área está limpa e desinfetada.

2 Posicione a Lanceta BD Microtainer® Quikheel™ contra o local da incisão, com o logo para frente, voltado para você. Coloque o nome da lanceta em um ângulo de 90 graus, respeitando a área permitida para realizar a incisão.


3 Com o dedo indicador ative a lanceta pressionando o botão branco. Espere ao menos 3 segundos para remover a lanceta.

4 Descarte a lanceta em um descartador apropriado para materiais perfurocortantes.

5a Coleta a amostra conforme o protocolo de sua instituição e de acordo com o teste que esteja realizando.

5b. Amostra capilar.

Coleta de Sangue com Lanceta BD Microtainer® Contact Activated

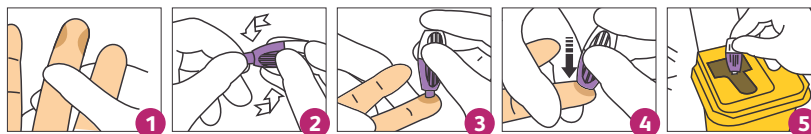

1 Escolha o local apropriado para a punção. Faça a antissepsia para iniciar o procedimento.

2 Gire a tampa para romper o lacre e descarte-a.

3 Segure a lanceta entre os dedos. Posicione a lanceta com firmeza no local da punção, conforme ilustração.

4 Para ativá-la pressione com firmeza o local da punção. Não remova o dispositivo até ouvir um clique.

5 Descarte a lanceta utilizada em descartador para perfurocortante.