

HYDROCLEAN PLUS



Descrição

HydroClean Plus é um curativo hidro-responsivo cujo principal componente é o poliacrilato superabsorvente (SAP) integrado em fibras de celulose. O SAP, ativado com solução de ringer, está ligado à polihexametileno biguanida (PHMB), uma substância antimicrobiana.

Composição

Composto por poliacrilato superabsorvente (SAP) integrado a fibras de celulose. Ativado com solução de Ringer ligado a polihexametileno biguanida (PHMB).

Coberto por uma malha de polipropileno e tiras de silicone.

A face externa da cobertura, possui uma película de poliacrilato superabsorvente (SAP), fibras de celulose, solução Ringer, polihexametileno biguanida (PHMB) e polipropileno hidrófoba que assegura a umidade em seu interior. Já na versão Cavity, ambas as faces permitem a interação com o leito da ferida.

Mecanismo de ação

HydroClean plus e Hydroclean Cavity realizam a liberação sustentada de ringer no leito da ferida. Devido à interação simultânea de absorção e hidratação contínua, o curativo proporciona a absorção de exsudato. O SAP utilizado no HydroClean desativa as MMPs, que dificultam a cicatrização, possibilitando assim a reativação do processo cicatricial.

Indicação

Tratamento úmido de feridas crônicas promovendo o preparo adequado do leito da ferida.

Instruções de uso

HydroClean plus é aplicado com as tiras de silicone em contato com o leito da ferida, de forma que a marcação verde fique virada para cima. Em caso de feridas profundas devem ser preenchidas com HydroClean cavity e cobertas com Hydroclean Plus. O tratamento úmido com solução de Ringer não provoca maceração, mas em contato direto com a pele pode apresentar um esbranquiçamento da mesma, para evitar tal ocorrência, pode-se aplicar uma pomada hidratante ou protetor cutâneo nas bordas da lesão.

Tempo de troca

Liberação sustentada por até 72 horas.

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um

dos seus componentes.

Precauções

O HydroClean não deve ser recortado nem danificado mecanicamente.

Armazenagem e transporte

Conservar a uma temperatura inferior a 30°C. Conteúdo estéril.

Esterilização: Esterilização a Vapor

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa:

HydroClean Plus 80170310095

HydroClean Plus Cavity 80170310075

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenu CRF - SP 10.308

HydroClean Plus

Código	Tamanho do Produto	Quantidade por caixa
609591-1 / 609606-3	5,5 cm round	10
609593-1 / 609608-3	7,5 x 7,5 cm	10
609594 / 609612-3	10 x 10 cm	10

HydroClean Plus Cavity

Código	Tamanho do Produto	Quantidade por caixa
609008-0	7,5 x 7,5 cm	10

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

