

FICHA TÉCNICA
Cath-Fix™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres na Pele

Nome Genérico	Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres na Pele			
Nome Comercial	Cath-Fix™ Dispositivo para Fixação de Sondas e Cateteres na Pele			
Imagem				
Descrição	Cath-Fix™ consiste de um adesivo desenhado para uma eficiente fixação de cateteres, sondas e cabos à pele. Não estéril.			
Marca	ConvaTec® Cath-Fix™			
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido Unomedical s.r.o – Eslováquia			
Composição do Produto	Cath-Fix™ é confeccionado em polipropileno não tecido revestido com adesivo acrílico grau médico e coberto por uma folha de papel siliconizado que é removida no momento do uso. Não contém látex.			
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Cath-Fix é indicado para a fixação de todos os tipos de cateteres, sondas e cabos à pele, como cateteres centrais, cateteres urinários e cabos de eletrocardiograma. • É fácil e rápido de aplicar. • É confortável para o paciente e previne o deslocamento acidental dos cateteres, sondas e cabos. Isso pode reduzir o tempo de enfermagem na re-fixação ou recolocação dos cateteres, sondas e cabos. • Seu material de fabricação permite a respiração da pele enquanto minimiza o risco de maceração da mesma ou reações alérgicas. 			
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</p> <p>1) Remover o papel protetor da parte central (mais estreita) do dispositivo e aplicá-la sobre o cateter, sonda ou cabo, de forma que as partes laterais (mais largas) fiquem lateralmente ao mesmo.</p> <p>2) Remover o restante do papel protetor do dispositivo e fixar as partes laterais à pele.</p> <p>O dispositivo deve ser trocado se ficar sujo ou úmido. Trocas de rotina devem seguir os protocolos institucionais.</p> <p>Produto de uso único.</p>			
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 5º C e 30º C. Manter em local seco e ao abrigo da luz solar.			
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA Nº 80523020026			
NCM	3005.10.90			
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Tamanho	Unidades por Caixa
630M-S	BR10256	265822	Pequeno: 2,6 x 3,65 cm	100
630M-M	BR10257	265821	Médio: 5,2 x 6,5 cm	100
630M-L	BR10258	265820	Grande: 8,1 x 10,3 cm	100