

## RELATÓRIO TÉCNICO

**BIOART**  
**Irrigadores**  
**MS.: 80330630015**

### MARCA



### FABRICANTE

**BIOTEC PROD HOSP LTDA**  
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –  
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000  
CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:  
433.097.131.111  
MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000  
E-mail: [biotec@biotechospitalar.com.br](mailto:biotec@biotechospitalar.com.br)

### **Composição:**

Dispositivo atóxico, isento de látex, ponta introdutora/ perfurador com tampa, conector perfurador duplo, equipo curto com prolongador e conectores.

### **Indicação:**

É indicado para irrigação de médio e baixo fluxo em procedimentos médicos.

### **Apresentação:**

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.  
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

### **Instrução de Uso:**

Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.  
Verificar se o diâmetro é adequado ao produto.  
Conectar a extensão ao frasco de soro.  
Realizar a irrigação com o dispositivo.  
Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.  
O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica.  
Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.  
Verifique se o produto se encaixou adequadamente.  
Produto de Uso Único – Destruir após o uso

### **Precauções, restrições e advertências:**

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

**Imagens:**

**BIOART IRRIGADOR SORO ALTA**



**BIOART IRRIGADOR SORO**



**BIOART TRANSFER DE FLUIDOS**



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
BIOART IRRIGADOR SORO	Dispositivo atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, conector luer com tampa.	00.15.034
BIOART IRRIGADOR SORO ALTA	Dispositivo atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, prolongador e tampa.	00.15.035
BIOART TRANSFER DE FLUIDOS	Dispositivo atóxico, ponta introdutora/ perfurador com tampa, conector perfurador duplo.	00.15.033