

RELATÓRIO TÉCNICO

BIOSET COMBI

MS.: 803.306.390.01

MARCA



FABRICANTE

BIOTEC PROD HOSP LTDA

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão C –
Terra Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 07.204.591/0001-68 – IE:
433.097.131.111

MS: GY86613786X5 - PABX: (11) 4818-9000

E-mail: biotec@biotechospitalar.com.br

Característica do Produto:

Oclusor de dispositivos em rosca – Luer.

São fabricados em resinas termoplásticas atóxicas sobre processo de injeção e extrusão. Isento de látex.

Indicação:

Dispositivo oclusor da linha de infusão.

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 5 caixas.

Instrução de Uso:

- ✓ Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.
- ✓ Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
- ✓ Verifique se o produto se encaixou adequadamente.
- ✓ Produto de Uso Único – Descartar após o uso.

Advertência:

- ✓ - Evite temperaturas elevadas;
- ✓ - Proteger da luz e umidade;
- ✓ - Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- ✓ - Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESTRUIR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL.

Imagens:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOTEC
EQUIPO BIOSET TAMPA LUER	Oclisor de dispositivos em rosca – Luer.	00.13.014