

**FICHA TÉCNICA**
**ESTEEM™+ BOLSAS DE OSTOMIA DE UMA PEÇA DURAHESIVE PLUS®**

<b>Nome Genérico</b>	Bolsa de uma peça drenável e recortável para colostomia / ileostomia
<b>Nome Comercial</b>	ESTEEM™+ Bolsas de Ostomia de Uma Peça Durahesive Plus®
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivos de uma peça para ostomia, compostos de uma bolsa coletora e uma placa adesiva de hidrocólóide reforçada por uma borda de adesivo acrílico.</li> <li>• As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.</li> <li>• Sobre a superfície das bolsas está fixada tela protetora (painel de conforto) que permite a respiração da pele e aumenta o conforto.</li> <li>• As bolsas apresentam filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa.</li> <li>• As placas protetoras possuem orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato entre 19 e 64 mm de diâmetro.</li> <li>• A placa vem protegida por um protetor com guia de recorte impresso que pode ser utilizado para recortar o orifício da placa no tamanho adequado ao estoma e que deve ser retirado no momento do uso.</li> <li>• As bolsas não necessitam clip de fechamento pois contam com o sistema Invisiclose acoplado ao fim da bolsa.</li> <li>• Para discrição total as bolsas apresentam “Lock-it-Pocket”, uma discreta abertura em formato de bolso para ocultar o fecho.</li> </ul>
<b>Marca</b>	Esteem™+ Durahesive Plus® ConvaTec®
<b>Fabricante</b>	ConvaTec Inc. – Estados Unidos ConvaTec Dominican Republic Inc. – República Dominicana
<b>Composição do Produto</b>	<p><b>Bolsas coletoras:</b> filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de vinilileno (EVA), as bolsas possuem ainda filtro composto de carvão ativado e laminado de membrana médica embutido na parte anterior superior da bolsa e protegido do contato direto com o efluente por meio de um filme de polietileno.</p> <p><b>Painel de Conforto:</b> tela protetora de polietileno (PE) e politereftalato de etileno (PET).</p> <p><b>Fecho Invisiclose:</b> sistema de fechamento composto por duas tiras plásticas brancas feitas de poliestireno e duas tiras plásticas serrilhadas feitas de propileno (fecho de intertravamento).</p> <p><b>Placas adesivas Durahesive Plus:</b> composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocólóides absorventes e protetores da pele), borracha de etileno-polipropileno, resina de hidrocarboneto alifático, polímero SIS, tetrakis (metileno[3,5-di-tert-butil-4-hidroxihidrocinaurato]) metano, petrolato e celulose em pó. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e o lado adesivo é protegido por um protetor</p>

	de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Para maior suporte, uma borda adesiva de polietileno não tecido e adesivo acrílico circunda a placa.				
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada.</li> <li>• Multi medidas: recortável e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de estoma.</li> <li>• Opção de bolsa transparente: Permite a visualização do estoma e drenagens.</li> <li>• Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente.</li> <li>• Filtro de carvão ativado: minimizam odores e gases.</li> <li>• Fechamento sem clip: sistema Invisiclose mais fácil e discreto para o paciente.</li> </ul>				
<b>Recomendações de Uso</b>	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p><b>1. Preparo da pele:</b> Suas mãos e a pele ao redor do estoma devem estar limpas, secas e livres de substâncias gordurosas antes da aplicação.</p> <p><b>2. Preparo da bolsa:</b> Desenhe o formato do estoma no guia de recorte impresso no protetor da placa adesiva. Corte a placa adesiva exatamente na parte externa do desenho, tomando cuidado para não cortar o plástico da bolsa. Não corte além da última linha. Alise a abertura do corte com os dedos.</p> <p>Observações: 1) O anel adesivo pode causar irritação da pele de usuários de fraldas. Se ocorrer irritação, remova o anel da barreira cutânea. 2) Proteja o estoma contra trauma ou lesão.</p> <p><b>3. Colocação da bolsa:</b> Separe as películas da bolsa para permitir a entrada de ar. Remova o protetor da placa adesiva. Centralize a abertura da placa adesiva sobre o estoma. Aplique a placa adesiva sobre a pele ao redor do estoma por 30 segundos. Remova o papel protetor restante da borda adesiva. Alise a placa e borda adesiva para remover dobras. Use enquanto o produto estiver confortável e seguro. O tempo de uso pode variar.</p> <p><b>4. Fechamento da Bolsa:</b> Dobre o fecho a partir da tira branca na extremidade até que os fechos de intertravamento fiquem sobrepostos. Pressione os fechos de intertravamento por toda a extensão até sentir que se fecharam. Se desejar, vire o bolso ao contrário para ocultar o fecho ou envolva a aba ao redor da parte de trás da bolsa.</p> <p><b>5. Esvaziamento da bolsa:</b> Abra o fecho da bolsa puxando ambas as extremidades das tiras com os dedos; drene a bolsa.</p> <p><b>6. Informações sobre bolsas com filtros:</b> Cubra o filtro com o adesivo fornecido ao tomar banho, nadar, etc. Remova-o após o término da atividade.</p> <p><b>7. Remoção da bolsa:</b> Começando pela parte superior, pressione levemente a pele periestomal com uma das mãos e puxe cuidadosamente a borda da placa adesiva com a outra mão, até retirar completamente a bolsa.</p>				
<b>Cuidados de Conservação</b>	Conservar em local seco.				
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro ANVISA 80523020046				
<b>NCM</b>	3006.91.10				
	<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Característica</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
	416975	BR10406	274217	Opaca 19-64 mm	10
	476976	BR10407	274198	Transparente 19-64 mm	10