

## SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL MS 1.02078-20015

### Modelos: N° 04 à N°24

<b>Descrição do Produto</b>	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração dos modelos abaixo:											
<b>Calibres</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>		
<b>Diâmetro Externo</b>	1,35	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3		
<b>Diâmetro Interno</b>	0,65	1,20	1,7	2,3	2,8	3,1	3,7	4,2	4,9	5,3		
<b>Componente</b>	<b>Conectores:</b> 4,6, 8/10, 12,14,16/18 e 20/22/24 de PVC injetado											
	<b>Comprimento</b>			50 cm aproximadamente do N° 04 à N° 24								
	<b>Conformação da Ponta</b>			Aberta								
	<b>Furação</b>			2 furos								
	<b>Embalagem primária</b>			Papel grau cirúrgico com visor transparente								
<b>Identificação de rastreabilidade</b>	Seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, n° da ANVISA e código de barras.											
<b>Aplicação</b>	A aspiração traqueal de secreções é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções do pulmão. Produto siliconizado, pois possui em um dos processos de fabricação silicone como desmoldante.											
<b>Esterilização</b>	Esterilizado pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.											
<b>Cuidados</b>	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.											
<b>Empilhamento</b>	Máxima de 06 caixas de embarque.											
<b>Embalagem Final</b>	De acordo com cada calibre.											

<b>Instruções de Uso</b>	A aspiração deve ser feita a intervalos de duas horas até o máximo de quatro horas. Fazer a tapotagem antes da aspiração para mobilizar a secreção. Deve-se assegurar que a cabeça do paciente não está flexionada para frente. Se o paciente estiver consciente, solicita-lo a tossir a fim de superficializar a secreção. Deve-se assegurar que a cabeça do paciente não está flexionada para frente. Se o paciente estiver consciente, solicita-lo a tossir a fim de superficializar a secreção. Pinçar a sonda e introduzi-la na cânula endotraqueal, com a mão direita promover movimentos de semi-rotação na sonda de aspiração, a medida que for tracionando para fora. Terminada a aspiração, retirar a sonda cuidadosamente e desprezá-la. Em pacientes fazendo uso de respirador, ventilar a cada manobra de aspiração. Não aspirar por mais 10 a 15 segundos, porque podem ocorrer arritmias, bradicardias ou parada respiratória nos pacientes com respiração limítrofe, também podem ocorrer eventualmente riscos como estenose, fistula ou edema de glote, em todos os casos. Durante a aspiração, observar as reações do paciente, que podem ser: sudorese, cianose, ritmo respiratório, etc. e nesses casos, retirar imediatamente as sonda.	
<b>Classificação Fiscal</b>	9018.3929	
<b>Código de Barras</b>	7898430461514	SD. ASP. TRAQUEAL N°04 – 1 UNIDADE
	7898430461521	SD. ASP. TRAQUEAL N°06 – 1 UNIDADE
	7898430461538	SD. ASP. TRAQUEAL N°08 – 1 UNIDADE
	7898430461545	SD. ASP. TRAQUEAL N°10 – 1 UNIDADE
	7898430461552	SD. ASP. TRAQUEAL N°12 – 1 UNIDADE
	7898430461927	SD. ASP. TRAQUEAL N°14 – 1 UNIDADE
	7898430462115	SD. ASP. TRAQUEAL N°16 – 1 UNIDADE
	7898430462146	SD. ASP. TRAQUEAL N°18 – 1 UNIDADE
	7898430462153	SD. ASP. TRAQUEAL N°20 – 1 UNIDADE
	7898430462160	SD. ASP. TRAQUEAL N°22 – 1 UNIDADE
	7898430462177	SD. ASP. TRAQUEAL N°24 – 1 UNIDADE
	7898430460302	SD. ASP. TRAQUEAL N°04 C/1500 UNIDADES
	7898430460319	SD. ASP. TRAQUEAL N°06 C/1400 UNIDADES
	7898430460326	SD. ASP. TRAQUEAL N°08 C/1100 UNIDADES
	7898430460333	SD. ASP. TRAQUEAL N°10 C/1000 UNIDADES
	7898430460340	SD. ASP. TRAQUEAL N°12 C/900 UNIDADES
	7898430460357	SD. ASP. TRAQUEAL N°14 C/800 UNIDADES
	7898430462573	SD. ASP. TRAQUEAL N°16 C/500 UNIDADES
	7898430462597	SD. ASP. TRAQUEAL N°18 C/500 UNIDADES

<b>Código de Barras</b>	7898430462610	SD. ASP. TRAQUEAL N°20 C/400 UNIDADES
	7898430462634	SD. ASP. TRAQUEAL N°22 C/350 UNIDADES
	7898430462658	SD. ASP. TRAQUEAL N°24 C/300 UNIDADES