

**SONDA GÁSTRICA LEVINE
MS 1.02078-20016**
Modelos: N° 04 à N°24

Componentes	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração dos modelos abaixo:											
Calibres	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Diâmetro Externo	1,35	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	
Diâmetro Interno	0,65	1,20	1,7	2,3	2,8	3,1	3,7	4,2	4,9	5,3	5,6	
	Conector : 4,6, 8/10, 12,14,16/18 e 20/22/24 de PVC rígido injetado											
	Comprimento			120 cm aproximadamente do N° 04 à N° 24								
	Conformação da Ponta			Aberta								
	Furação			4 furos laterais alternados								
	Embalagem primária			Papel grau cirúrgico com visor transparente								
	Identificação de rastreabilidade seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, n° da ANVISA e código de barras.											

Aplicação	Indicada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior, usada em adultos e crianças para obter uma amostra do conteúdo gástrico (estômago) a fim de realizar estudos laboratoriais e para administrar medicações diretamente dentro do trato gastrointestinal, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar. Produto siliconizado, pois possui em um dos processos de fabricação silicone como desmoldante.
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque
Embalagem Final	De acordo com cada calibre.

Instruções de Uso	Durante a introdução, o paciente em geral fica sentado e com uma toalha aberta como se fosse um lenço sobre o tórax. Deve-se dispor o tempo todo de lenços de papel. O paciente é separado por um biombo dos demais pacientes e providencia-se uma boa iluminação. Ocasionalmente, o médico esfregará a narina e borrifará a orofaringe com tetracaína (Pontocaína) para aliviar o incômodo gerado pela passagem nasal e inibir o reflexo do vômito, além de tornar o procedimento mais tolerável. Fazer gargarejo com um anestésico líquido ou colocar pedaços de gelo na boca por uns poucos minutos pode fazer o mesmo efeito. Encorajar o paciente a respirar pela boca ou deglutir água, se isso for permitido, para ajudar a passagem da sonda. Quando a ponta estiver posicionada no estômago, a sonda é fixada ao nariz ou bochecha. A área preparada é coberta com uma tira de adesivo hipoalergênico.	
Classificação Fiscal	9018.3929	
Código de Barras	7898430460388	SD. LEVINE N°.04 - 1 UNIDADE
	7898430460395	SD. LEVINE N°.06 – 1 UNIDADE
	7898430460401	SD. LEVINE N°.08 – 1 UNIDADE
	7898430460418	SD. LEVINE N°.10 – 1 UNIDADE
	7898430460425	SD. LEVINE N°.12 – 1 UNIDADE
	7898430460432	SD. LEVINE N°.14 – 1 UNIDADE
	7898430460449	SD. LEVINE N°.16 – 1 UNIDADE
	7898430460456	SD. LEVINE N°.18 – 1 UNIDADE
	7898430460463	SD. LEVINE N°.20 – 1 UNIDADE
	7898430460470	SD. LEVINE N°.22 – 1 UNIDADE
	7898430464096	SD. LEVINE N°.24 – 1 UNIDADE
	7898430460920	SD. LEVINE N°.04 C/1200 UNIDADES
	7898430460944	SD. LEVINE N°.06 C/1100 UNIDADES
	7898430460968	SD. LEVINE N°.08 C/ 800 UNIDADES
	7898430460975	SD. LEVINE N°.10 C/ 700 UNIDADES
	7898430460982	SD. LEVINE N°.12 C/600 UNIDADES
	7898430463273	SD. LEVINE N°.14 C/400 UNIDADES
	7898430463297	SD. LEVINE N°.16 C/ 300 UNIDADES
	7898430463310	SD. LEVINE N°.18 C/250 UNIDADES

	7898430463334	SD. LEVINE N°.20 C/ 250 UNIDADES
	7898430463358	SD. LEVINE N°.22 C/ 200 UNIDADES
	7898430463372	SD. LEVINE N°.24 C/ 150 UNIDADES