

**SONDA NASOGÁSTRICA CURTA E LONGA**  
**MS 1.02078-20018**

**Modelos: N° 04 à N°24**

Componentes	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração dos modelos abaixo:											
<b>Calibres</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	
<b>Diâmetro Externo</b>	1,35	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	
<b>Diâmetro Interno</b>	0,65	1,20	1,7	2,3	2,8	3,1	3,7	4,2	4,9	5,3	5,6	
	<b>Conector:</b> 4,6, 8/10, 12,14,16/18 e 20/22/24 de PVC rígido injetado											
	<b>Comprimento</b>				40 cm aproximadamente – N° 04 à N° 24							
					100 cm aproximadamente – N° 04 à N° 24							
	<b>Conformação do Bico</b>				Fechada							
	<b>Furação</b>				2 furos							
	<b>Primária (individual)</b>				Papel grau cirúrgico com visor transparente							
	Identificação de rastreabilidade seguindo critérios da RDC nº16: Identificação individual com nº de lote, data de Fabricação e Validade, nº da ANVISA e código de barras.											
<b>Aplicação</b>	Indicada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior, usada em adultos e crianças para obter uma amostra do conteúdo gástrico (estômago) a fim de realizar estudos laboratoriais e para administrar medicações diretamente dentro do trato gastrointestinal, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar. Produto siliconizado, pois possui em um dos processos de fabricação silicone como desmoldante.											
<b>Esterilização</b>	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.											
<b>Cuidados</b>	Artigo Médico Hospitalar- Destruir após o Uso – Uso Único – Proibido Reprocessar - Estéril.											
<b>Empilhamento</b>	Máximo de 6 caixas de embarque.											
<b>Embalagem Final</b>	De acordo com cada calibre.											
<b>Instruções de Uso</b>	Durante a introdução, o paciente em geral fica sentado e com uma toalha aberta como se fosse um lenço sobre o tórax. Deve-se dispor o tempo todo de lenços de papel. O paciente é separado por um biombo dos demais pacientes e providencia-se uma boa iluminação. Ocasionalmente, o médico esfregará a narina e borrifará a orofaringe com tetracaína (Pontocaína) para aliviar o incômodo gerado pela passagem nasal e para inibir o reflexo do vômito, além de tornar o procedimento mais tolerável. Fazer gargarejo com um anestésico líquido ou colocar pedaços de gelo na boa por uns poucos minutos pode fazer o mesmo efeito. Encorajar o paciente a respirar pela boca ou deglutir água, se isso for permitido, para ajudar a passagem da sonda.											

Classificação Fiscal	9018.3929	
<b>Código de Barras</b>	7898430460616	SD. NASO CURTA N° 04 – 1 UNIDADE
	7898430460623	SD. NASO CURTA N° 06 – 1 UNIDADE
	7898430460630	SD. NASO CURTA N° 08 – 1 UNIDADE
	7898430460647	SD. NASO CURTA N° 10 – 1 UNIDADE
	7898430460654	SD. NASO CURTA N° 12 – 1 UNIDADE
	7898430460661	SD. NASO CURTA N° 14 – 1 UNIDADE
	7898430460678	SD. NASO CURTA N° 16 – 1 UNIDADE
	7898430460685	SD. NASO CURTA N° 18 – 1 UNIDADE
	7898430460692	SD. NASO CURTA N° 20 – 1 UNIDADE
	7898430461897	SD. NASO CURTA N° 22 – 1 UNIDADE
	7898430460708	SD. NASO CURTA N° 24 – 1 UNIDADE
	7898430460609	SD. NASO CURTA N° 04 C/1400 UNIDADES
	7898430460715	SD. NASO CURTA N° 06 C/1400 UNIDADES
	7898430460722	SD. NASO CURTA N° 08 C/ 1300 UNIDADES
	7898430460739	SD. NASO CURTA N° 10 C/1200 UNIDADES
	7898430460746	SD. NASO CURTA N° 12 C/ 1000 UNIDADES
	7898430460753	SD. NASO CURTA N° 14 C/ 900 UNIDADES
	7898430462856	SD. NASO CURTA N° 16 C/600 UNIDADES
	7898430462870	SD. NASO CURTA N° 18 C/500 UNIDADES
	7898430462894	SD. NASO CURTA N° 20 C/400 UNIDADES
	7898430462917	SD. NASO CURTA N° 22 C/400 UNIDADES
	7898430462931	SD. NASO CURTA N° 24 C/350 UNIDADES

	7898430460814	SD. NASO LONGA N° 4 – 1 UNIDADE	
<b>Código de Barras</b>	7898430460821	SD. NASO LONGA N° 6 – 1 UNIDADE	
	7898430460838	SD. NASO LONGA N° 8 – 1 UNIDADE	
	7898430460845	SD. NASO LONGA N° 10 – 1 UNIDADE	
	7898430460852	SD. NASO LONGA N° 12 – 1 UNIDADE	
	7898430460869	SD. NASO LONGA N° 14 – 1 UNIDADE	
	7898430460876	SD. NASO LONGA N° 16 – 1 UNIDADE	
	7898430460883	SD. NASO LONGA N° 18 – 1 UNIDADE	
	7898430460890	SD. NASO LONGA N° 20 – 1 UNIDADE	
	7898430460906	SD. NASO LONGA N° 22 – 1 UNIDADE	
	7898430461873	SD. NASO LONGA N° 24 – 1 UNIDADE	
	7898430460760	SD. NASO LONGA N° 4 C/1300 UNIDADES	
	7898430460777	SD. NASO LONGA N° 6 C/1300 UNIDADES	
	7898430460784	SD. NASO LONGA N° 8 C/800 UNIDADES	
	7898430460791	SD. NASO LONGA N° 10 C/700 UNIDADES	
	7898430460807	SD. NASO LONGA N° 12 C/600UNIDADES	
	7898430463051	SD. NASO LONGA N° 14 C/ 500 UNIDADES	
	7898430463075	SD. NASO LONGA N° 16 C/350 UNIDADES	
	7898430463099	SD. NASO LONGA N° 18 C/300 UNIDADES	
	7898430463112	SD. NASO LONGA N° 20 C/250 UNIDADES	
	7898430463136	SD. NASO LONGA N° 22 C/200 UNIDADES	
	7898430463150	SD. NASO LONGA N° 24 C/200 UNIDADES	