

**SONDA RETAL
MS 1.02078-20019**

Modelos: N° 04 à N°32

Descrição do Produto	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração dos modelos abaixo:											
Calibres	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Diâmetro Externo	1,35	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	
Diâmetro Interno	0,65	1,20	1,7	2,3	2,8	3,1	3,7	4,2	4,9	5,3	5,6	
Componentes	Conectores: 4,6, 8/10, 12,14,16/18 e 20/22/24 de PVC injetado Obs. As numerações de 26 à 32 não possuem conectores.											
	Comprimento			40 cm aproximadamente do N° 04 à N° 32								
	Conformação do Ponta			Aberta								
	Furação			1 furo lateral								
	Embalagem primária			Papel grau cirúrgico com visor transparente								
Identificação de rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, n° da ANVISA e código de barras.											
Aplicação	Indicado para aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso. Utilizável também para retirada de conteúdo fecal através do reto, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.. Produto siliconizado, pois possui em um dos processos de fabricação silicone como desmoldante.											
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.											
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar- Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar - Estéril											
Empilhamento	Máxima de 06 caixa de embarque.											
Embalagem Final	De acordo com cada calibre.											

Instruções de Uso	Conectar a sonda à extensão do irrigador, retirando o ar sobre a cuba-rim. Clampar a extensão do irrigador. Lubrificar a sonda retal, utilizando uma gaze com vaselina. Introduzir, com a mão direita, 8 a 10 cm de Sonda Retal no ânus, fazendo uso de uma gaze, utilizando movimentos rotatórios, e pedir ao paciente que inspire e expire profundamente, a fim de manter o relaxamento esfinteriano. Firmar a sonda retal com uma das mãos e com a outra desclampar a extensão do irrigador. Deixar escoar lentamente o líquido até restar pequena quantidade no irrigador e em seguida clampar a extensão. Quando o paciente não suportar todo o líquido do irrigador, clampar a extensão. Em se tratando da função de alívio o procedimento se iguala para efetuação da higiene do paciente.	
Classificação Fiscal	9018.3929	
Código de Barras	7898430462085	SD. RETAL N°4 – 1 UNIDADE
	7898430461255	SD. RETAL N°6 – 1 UNIDADE
	7898430461262	SD. RETAL N°8 – 1 UNIDADE
	7898430461279	SD. RETAL N°10 – 1 UNIDADE
	7898430461286	SD. RETAL N°12 – 1 UNIDADE
	7898430461293	SD. RETAL N°14 – 1 UNIDADE
	7898430461309	SD. RETAL N°16 – 1 UNIDADE
	7898430461316	SD. RETAL N°18 – 1 UNIDADE
	7898430461323	SD. RETAL N°20 – 1 UNIDADE
	7898430461330	SD. RETAL N°22 – 1 UNIDADE
	7898430461347	SD. RETAL N°24 – 1 UNIDADE
	7898430461354	SD. RETAL N°26 – 1 UNIDADE
	7898430461361	SD. RETAL N°28 – 1 UNIDADE
	7898430461378	SD. RETAL N°30 – 1 UNIDADE
	7898430461477	SD. RETAL N°32 – 1 UNIDADE
	7898430460111	SD. RETAL N°4 C/1400 UNIDADES
	7898430460241	SD. RETAL N°6 C/1400 UNIDADES
	7898430460258	SD. RETAL N°8 C/1300 UNIDADES
	7898430460265	SD. RETAL N°10 C/1200 UNIDADES

Código de Barras	7898430460272	SD. RETAL N°12 C/1000 UNIDADES
	7898430460296	SD. RETAL N°14 C/900 UNIDADES
	7898430463686	SD. RETAL N°16 C/600 UNIDADES
	7898430463709	SD. RETAL N°18 C/500 UNIDADES
	7898430463723	SD. RETAL N°20 C/400 UNIDADES
	7898430463754	SD. RETAL N°22 C/400 UNIDADES
	7898430463778	SD. RETAL N°24 C/350 UNIDADES
	7898430463792	SD. RETAL N°26 C/350 UNIDADES
	7898430463815	SD. RETAL N°28 C/350 UNIDADES
	7898430463839	SD. RETAL N°30 C/350 UNIDADES
	7898430463853	SD. RETAL N°32 C/300 UNIDADES