

**SONDA URETRAL
MS 1.02078-20014**
Modelos: N° 04 à N°24

Componentes	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração dos modelos abaixo:										
Calibres	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Diâmetro Externo	1,35	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0
Diâmetro Interno	0,65	1,30	1,7	2,3	2,8	3,2	3,8	4,3	4,8	5,1	5,6
	Conectores: 4,6, 8/10, 12,14,16/18 e 20/22/24 de PVC rígido injetado										
Comprimento	40 cm aproximadamente do N° 04 à N° 24										
Conformação do Ponta	Fechada										
Furação	1 furo lateral										
Embalagem primária	Papel grau cirúrgico com visor transparente										
	Identificação de rastreabilidade seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, n° da ANVISA e código de barras.										

Aplicação	Indicado quando ocorre a obstrução do trato urinário ou quando o paciente é incapaz de urinar e no pós-cirúrgico para drenar a urina retida ou promover uma forma de monitorizar o débito urinário horário em pacientes em estado crítico. Produto siliconizado, pois possui em um dos processos de fabricação silicone como desmoldante.
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.
Empilhamento	Máxima de 06 caixa de embarque.
Embalagem Final	De acordo com cada calibre.

Instruções de Uso	Ao aplicar a sonda, usar luvas e máscara, esterilizadas e descartáveis, reunir todos os materiais necessários para o procedimento. Para pacientes do sexo feminino, afastar os pequenos lábios com o polegar e o indicador da mão esquerda e com a mão direita introduzir a sonda pré-lubrificada (mais ou menos 10 cm) e colocar a outra extremidade na cuba-rim para receber a drenagem. Pacientes do sexo masculino, segurar o pênis com uma gaze com a mão esquerda, e mantê-lo em posição perpendicular ao abdômen, afastar o prepúcio com o polegar e introduzir a sonda até 18 a 20 cm com movimentos para baixo e baixar o pênis algumas vezes para facilitar a passagem na uretra bulbar. Em ambos os pacientes após o término da introdução, fixar a sonda na coxa ou na reunião hipogástrica.	
Classificação Fiscal	9018.3929	
Código de Barras	7898430461767	SD. URETRAL N° 04 – 1 UNIDADE
	7898430461774	SD. URETRAL N° 06 – 1 UNIDADE
	7898430461781	SD. URETRAL N° 08 – 1 UNIDADE
	7898430461798	SD. URETRAL N° 10 – 1 UNIDADE
	7898430461804	SD. URETRAL N° 12 – 1 UNIDADE
	7898430461811	SD. URETRAL N° 14 – 1 UNIDADE
	7898430461828	SD. URETRAL N° 16 – 1 UNIDADE
	7898430461835	SD. URETRAL N° 18 – 1 UNIDADE
	7898430461842	SD. URETRAL N° 20 – 1 UNIDADE
	7898430461859	SD. URETRAL N° 22 – 1 UNIDADE
	7898430461866	SD. URETRAL N° 24 – 1 UNIDADE
	7898430460364	SD. URETRAL N° 04 C/1400 UNIDADES
	7898430460371	SD. URETRAL N° 06 C/1400 UNIDADES
	7898430460487	SD. URETRAL N° 08 C/1300 UNIDADES
	7898430460500	SD. URETRAL N° 10 C/1200UNIDADES
7898430460524	SD. URETRAL N° 12 C/1000 UNIDADES	

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

<https://www.freepdfconvert.com/membership>