

3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

3M Coban™ 2 Sistema de Compressão de 2 Camadas



3M Coban™ 2

Compressão na medida certa

3M

O que é úlceras de perna?

As úlceras de perna têm um grande impacto na qualidade de vida e produtividade do indivíduo, além de alto custo para a saúde pública.

Síndrome caracterizada por perda circunscrita ou irregular da pele, podendo atingir até subcutâneo e tecidos subjacentes. Sua causa está relacionada a doenças do sistema vascular arterial, venoso ou ambos.



Etiologia das úlceras de perna

- 80 a 85%: insuficiência venosa crônica
- 5 a 10%: doença arterial
- Demais: mista, neuropática (diabética)

Fonte: Frade et al, 2005

3M Coban™ 2 Sistema de Compressão de 2 Camadas

Terapia compressiva com o máximo de tecnologia e inovação. Oferece conforto e a compressão necessária durante o tratamento de úlceras venosas e outras condições em que a terapia de compressão é necessária, reduzindo o edema crônico.

Um sistema fácil de usar, que reduz erros na aplicação e garante a compressão certa no tratamento.



3M Coban™ 2 Sistema de Compressão de 2 Camadas



Indicado
para

ITB \geq 0.8

- Pode ser mantido por até 7 dias sem escorregar nem garrotear.

1ª Camada - Conforto

- Feita de espuma de poliuretano e material coesivo.
- Aplicada com o lado da espuma contra a pele, adapta-se suavemente ao formato da perna.
- Oferece maciez e minimiza o escorregamento, preservando o movimento de articulação.

2ª Camada - Compressão

- Feita de material coesivo.
- **Aplicação segura:** sem risco de excesso de compressão. Deve ser aplicada completamente esticada. Ao chegar no estiramento total, a camada oferece a compressão efetiva e limita qualquer compressão adicional.
- **Compressão inteligente:** tecnologia 3M mantém o nível correto de compressão.
- **Compressão tanto em repouso quanto em movimento.**

Benefícios do sistema de compressão 3M Coban™ 2

- Melhora o conforto dos pacientes, aumentando a tolerância ao tratamento.
- Sistema fino e discreto permite que usem seus próprios sapatos e roupas.
- Composição livre de látex para eliminar o risco de alergias.
- Mantém compressão sustentada por até 7 dias.

3M Coban™ 2 Lite

Sistema de Compressão Leve de 2 Camadas



Indicado
para

ITB ≥ 0.5

- Segurança e tecnologia permitem uso liberado em úlceras de etiologia mista.
- Indicado para pacientes menos tolerantes à terapia de compressão ou que estão iniciando o tratamento.
- Reduz o risco de dano nos tecidos.

A Úlcera Venosa (UV) é considerada a mais frequente dentre as úlceras de perna.

O que são úlceras venosas?

São feridas crônicas nos membros inferiores causadas por insuficiência venosa crônica, provocadas por incompetência do sistema venoso superficial, sistema venoso profundo ou ambos, com insuficiência valvular ou obstrução venosa ou ambos.

“78% delas apresentam recidiva após 2 anos.”

Referência: Maffei, 1995.



Tratamento de úlcera venosa



Confira o passo a passo da nova terapia 3M Coban™ 2

Camada 1: Camada Interna de Conforto



Inicie a aplicação com bandagem circular na base dos dedos, começando na ponta do quinto metatarso.




A segunda volta da bandagem circular deve ser feita sobre a parte superior do pé para que a atadura cubra a região da articulação do tornozelo.



A próxima volta da bandagem deve ser feita no calcanhar. Na maioria dos casos, a superfície plantar não é completamente coberta. No entanto, isto não é necessário e um enfaixamento adicional no tornozelo tornaria a aplicação desnecessária e espessa.



A camada de conforto não se ajusta completamente ao tendão de Aquiles. O excesso de material deverá ser ajustado sem causar dor ou desconforto quando coberto pela camada de compressão.

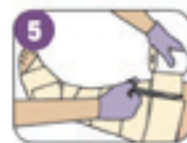

Prossiga até o Joelho com um mínimo de sobreposição, usando tensão suficiente apenas para adaptação ao formato da perna. Corte o excesso de material. Uma leve pressão deve ser aplicada ao final da bandagem para garantir que permanecerá no local durante a aplicação da camada de compressão.

Camada 2: Camada Externa de Compressão



Inicie a aplicação com enfaixamento circular na base dos dedos, começando na ponta do quinto metatarso.



Complete até três enfaixamentos na forma de oito no tornozelo, assegurando que todo calcanhar ficará coberto com pelo menos duas camadas.



Prossiga pela perna até que 50% da camada externa sobreponha toda a camada interna de conforto. Mantenha uma tensão constante em todo processo de aplicação.



Após aplicação, pressione levemente toda a superfície onde foi aplicada a camada de compressão para garantir uma ótima conformabilidade e também a aderência da atadura em si própria e na camada interna de conforto.



3M Coban™ 2 Sistema de Compressão de 2 Camadas pode ser removido com uma tesoura ou ser desenrolado.

Código	Descrição	Qtde./Caixa
2094	Coban™ 2 - Sistema de Compressão de 2 Camadas	8 kits
2794	Coban™ 2 Lite - Sistema de Compressão Leve de 2 Camadas	8 kits

Fale com a 3M

0800-0132333

www.3M.com.br/assistenciaopaciente
3msolucoesparaenfermagem@mmm.com



facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem



youtube.com/3mSolucoesEnfermagem

3M