

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Compressas

Nome comercial do Produto: Compressa de Gaze Viscose Estéril Neve

Reg. ANVISA: 81855830014

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze Viscose são embaladas em papel grau cirúrgico e filme plástico termo selável. Podendo conter 05 ou 10 unidades por envelope.

Os envelopes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque.

INDICAÇÃO DE USO:

As Compressas de Gaze Viscose é indicada para uso hospitalar em absorções de sangue e outras secreções. Indicado também para procedimentos em geral como higiene, assepsia e curativos.

Diminui o risco de adesão ao ferimento.

DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

As Compressas de Gaze Viscose são confeccionadas em tecido de alta qualidade, devidamente beneficiado e trabalhado para fins cirúrgicos. É totalmente isento de impurezas e agentes contaminantes como alvejante óptico e resíduo de amido. Totalmente hidrófilo, com alto poder de absorção e retenção de líquidos.

As Compressas de Gaze Viscose Estéril Neve são confeccionadas em tecido 100% viscosa.

São confeccionadas e comercializadas nas dimensões:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79106-75	COMP.GAZE 13F 7,5X7,5 EST. C/05 VISC.	789817281719-8
79106-78	COMP.GAZE 13F 7,5X7,5 EST. C/10 VISC.	789817281722-8

MODO DE USO:

Retirar as Compressas de Gaze de sua embalagem original e aplicar no local afetado. Utilizar conforme os procedimentos padronizados, de acordo com a finalidade proposta. O produto deve ser utilizado se alguma das características citadas estiverem em desacordo.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para o fim a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto estéril por Óxido de etileno.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

Produtos são customizados. Não baseados na norma referenciada.

VALIDADE:

Válido por 05 anos após a data de fabricação.