

**COLETOR DE URINA INFANTIL ESTÉRIL
MS 1.02078-20001**

Capacidade	100 ml de 10 /10 ml	
Componentes	Fita adesiva dupla face	Adesivo testado e aprovado pelo Laboratório Adolph Lutz em relação a irritabilidade dérmica
Descrição do Produto	Dimensões da fita adesiva	6.8 x 9,7 cm ± 0,05
	Formato do orifício central	Masculino – Redondo
		Feminino/Unisex – Oval
Saco Plástico	Filme de polietileno de baixa densidade Dimensões 101mm x 175 mm - 5mm / + 5mm Espessura 0,10mm (duas faces) - 1mm / + 1mm	
Acondicionamento	Embalagem primária (individual)	Papel grau cirúrgico com visor transparente
	Caixa primária	Contém 100 peças
	Caixa de embarque	Contém 1000 peças
Rotulagem	Etiqueta adesiva individual com código de barra	
Aplicação	Indicado para coleta de urina em crianças de modo asséptico.	
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.	
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar- Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar - Estéril	
Empilhamento	Máximo de 5 caixas de embarque.	
Embalagem final	Caixa de papelão contendo 10 caixas primárias com 100 peças cada.	
Instruções de Uso	Deve-ser realizada higienização e secagem do local da aspiração para perfeita aderência do produto e evitar contaminação cruzada com qualquer agente estranho que estiver presente na epiderme. Destacar a película da fita adesiva, iniciando por uma das suas extremidades. Retire toda a película inclusive pelo qual entrará a amostra do material a ser coletado. Aplicar o coletor na área apropriada, aderindo à parte adesiva na pele com suave compressão. Após a coleta, retirar e dobrar a sua parte superior de tal modo a obter um fechamento completo do coletor. Destruir após o uso.	
Classificação Fiscal	3926.9030	

CÓDIGO DE BARRAS	7898430460210	COLETOR UNISSEX – 01 UNIDADE
	7898430461958	COLETOR UNISSEX C/100 UNIDADES
	7898430463952	COLETOR UNISSEX C/1000 UNIDADES
	7898430460173	COLETOR FEMININO – 01 UNIDADE
	7898430461934	COLETOR FEMININO C/100 UNIDADE
	7898430463914	COLETOR FEMININO C/1000 UNIDADE
	7898430460197	COLETOR MASCULINO – 01 UNIDADE
	7898430461941	COLETOR MASCULINO C/100 UNIDADE
	7898430463938	COLETOR MASCULINO C/1000 UNIDADE