

**EXTENSÃO PARA DRENAGEM URINÁRIA
MS 1.02078-20017**

Descrição do Produto	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme descrição ao lado	Tubo Nº 16 Cristal			
Especificação	Diametro Externo	5,3			
	Diametro Interno	3,7			
	Espessura da parede	0,8			
Componentes	Conector Graduado 1 unidade (extremidade)	Tipos / Dimensões	201	207	201 (02)
		DI	4,00 mm	8,0 mm	4,00 mm
		DE	8,00 mm	14,0 mm	8,00 mm
		Cortado	5 cm	6 cm	5 cm
Comprimento	150 cm aproximadamente				
Embalagem primária	Papel grau cirúrgico com visor transparente				
Identificação de rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC nº16: Identificação individual com nº de lote, data de Fabricação e Validade, nº da ANVISA e código de barras.				
Aplicação	É indicada como prolongador de tubulação em pacientes sondados por uma sonda uretral, na drenagem de urina até um coletor de sistema aberto ou fechado, sendo utilizado exclusivamente por profissionais especializados e capacitados da área médico-hospitalar, segundo as normas e práticas hospitalares.				
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.				
Cuidados	Artigo Médico hospitalar – Destruir após o Uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.				
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque				
Embalagem Final	250 peças				
Instruções de Uso	Clampar a sonda, introduzida no paciente e só então, fazer a conexão com a extensão ou tubo extensor. Verificar o direcionamento da saída da extensão no recipiente receptor da drenagem ou o direcionamento da entrada de ar no sistema, no caso de tubo extensor. Verificada a localização e a junção, desclampar a sonda e continuar/ inicializar o procedimento.				

Classificação Fiscal	9018.3929	
Código de Barras	7898430464805	EXTENSÃO DRENAGEM 16 – 1,50 CM 1 UNIDADE
	7898430464812	EXTENSÃO DRENAGEM 16 C/250 UNIDADES