

**EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO
MS 1.02078-20022**

Descrição do produto	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme descrição ao lado	Tubo N° 16 Verde			
Especificação	Diametro Externo	5,3			
	Diametro Interno	3,7			
	Espessura da parede	0,8			
	Comprimento	2M ou 3 M aproximadamente			
Componentes	Tubo Cirúrgico- conector graduado	Tipos / Dimensões	201	207	201 (02)
	2 unidades uma em cada extremidade. Fabricado em PVC	DI	4,00 mm	8,0 mm	4,00 mm
		DE	8,00 mm	14,0 mm	8,00 mm
		Cortado	5 cm	6 cm	5 cm
Embalagem primária	Papel grau cirúrgico com visor transparente				
Identificação de rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, Responsável Técnica, n° da ANVISA e código de barras.				
Aplicação	É indicada como prolongador de tubulação em pacientes usuários de catéter de oxigênio tipo sonda, entre paciente com catéter e a saída de oxigênio da parede ou cilindro.				
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.				
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.				
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque				
Instruções de Uso	Verificar com certeza a necessidade da extensão. Reunir o material asséptico necessário para o procedimento. Clampear a sonda, cateter de oxigênio ou o equipo ligado ao paciente e só então fazer a conexão com a extensão. Verificar o direcionamento da saída da extensão no recipiente receptor ou entrada de ar no sistema. Verificada a localização e a junção desclampar o catéter e continuar ou inicializar o procedimento. Destruir após o uso.				
Classificação Fiscal	9018.3929				

Código de Barras	7898430463747	EXTENSÃO OXIGÊNIO 16 2M – 1 UNIDADE
	7898430460913	EXTENSÃO OXIGÊNIO 16 3M – 1 UNIDADE
	7898430463976	EXTENSÃO OXIGÊNIO 16 2M C/200 UNIDADES
	7898430461002	EXTENSÃO OXIGÊNIO 16 3M C/150 UNIDADES