



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Oxímetro de Dedo

Controle: FTP-MON-001

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 1/3

**FABRICANTE:**

Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co. Ltd. - CHINA

**REGISTRO ANVISA:**

10424960004

**NCM:**

9027.30.20

**VALIDADE:**

Indeterminada

**GARANTIA:**

6 meses

**EAN DO PRODUTO:**

A3 - 7898906239401

**CAIXA DE EMBARQUE:**

xxxxx



OXÍMETRO A3 VERDE

CÓD. PRODUTO		SIMPRO	
OX4000	A2	172882	A2
OX4003	A3 - Amarelo	172885	A3 - Amarelo
OX4004	A3 - Verde	172885	A3 - Verde
OX4001	A4	172883	A4

## 1 DESCRIÇÃO

O oxímetro de dedo foi desenvolvido para medir a saturação periférica de oxigênio e a frequência cardíaca pelo dedo indicador com rapidez, precisão e praticidade. Econômico, o oxímetro de dedo se desliga automaticamente caso não receba sinal por 8 segundos e opera por 50 horas contínuas com apenas duas pilhas AAA. Realiza a medição da saturação periférica de oxigênio (spo2); frequência cardíaca.

Possui display em LCD e desligamento automático. Oxímetro de dedo, portátil, tela LCD colorida. Realiza a medição da saturação periférica de oxigênio (spo2); frequência cardíaca.

## 2 MODO DE USAR

- Abra a embalagem, retire o oxímetro e ou acessórios da caixa. Retire os acessórios de acordo com a lista de produtos, e procure qualquer sinal de danos mecânicos;
- Insira as duas pilhas AAA de forma adequada e na direção correta;
- Pressione o botão **START** para verificar se o dispositivo está funcionando;



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Oxímetro de Dedo

Controle: FTP-MON-001

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 2/3

- Posicione o dedo do paciente nas almofadas do clipe e feche;
- Pressione o botão **START** no painel dianteiro;
- Não agite o dedo e mantenha o usuário calmo durante o processo;
- Obtenha as informações diretamente da tela do visor.

### 3 LIMPEZA

- Limpeza: utilize algodão com álcool para limpar o visor e guarde no estojo.

### 4 ARMAZENAGEM

- Não utilize o oxímetro em ambientes onde possa haver gases inflamáveis;
- Não use o equipamento em pacientes que estejam fazendo ressonância magnética ou tomografia computadorizada;
- O equipamento não é a prova d'água.

### 5 DIMENSÕES

- 3,5 cm x 4 cm x 6,5 cm (A x L x P);
- Peso 0,050 kg.

### 6 CONTÉM

- 1 Oxímetro de dedo;
- 1 Manual do usuário.

**INSPIRANDO SAÚDE. EXPIRANDO QUALIDADE.**



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Oxímetro de Dedo

Controle: FTP-MON-001

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 3/3



OXÍMETRO A2



OXÍMETRO A4

\*Imagens meramente ilustrativas. As cores variam de acordo com disponibilidade do estoque.

# INSPIRANDO SAÚDE. EXPIRANDO QUALIDADE.