



A MAIS **REVOLUCIONÁRIA TÉCNICA**
PARA A REALIZAÇÃO DE **EXAMES**
PARASITOLÓGICOS, QUE GARANTE
A VERDADEIRA QUALIDADE DOS
RESULTADOS



TF-Test®
3 Amostras



TF-Test®
1 Amostra



O TF-Test® é o **teste mais sensível do mercado** que oferece a coleta e processamento das amostras fecais, favorecendo a alta concentração de helmintos e protozoários intestinais no procedimento.

▶ VANTAGENS

- ✓ Filtragem por centrifugo-sedimentação;
- ✓ Preserva a amostra até 30 dias, sem necessidade de refrigeração;
- ✓ O líquido conservante não agride as formas parasitárias;
- ✓ Elimina o mau cheiro.

▶ DIFERENCIAL

O TF-Test® é um produto de inovação tecnológica, com concessão de patentes nacionais e internacionais, e que teve apoio integral da Fundação De amparo e pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP-PIPE) e Universidade Estadual de Campinas (LIDS-UNICAMP).*

Centros de referencias do Estado de São Paulo como HC, UNICAMP, USP, UNITAU, UNESP comprovaram: O TF-Test® é superior às demais técnicas parasitológicas usadas em rotina laboratorial.

*ref. GOMES JF, HOSHINO-SHIMIZU S, DIAS LC, ARAUJO AJ, CASTILHO VL, NEVES FA. 2004;
Evaluation of a novel kit (TF-Test) for the diagnosis of intestinal parasitic infections.
Journal of Clinical Laboratory Analysis 18(2):132-8.

▶ PROCEDIMENTO DE COLETA



Abra o tubo com cuidado para não derramar o líquido conservante. (Não colocar excesso de fezes).



Colete (com a pá coletora), apenas a quantidade que a preencha, como na ilustração (Não colocar excesso de fezes).



Coloque as fezes no tubo coletor, sem ultrapassar a faixa de tolerância para coleta.



Importante: Feche o tubo coletor, e AGITE vigorosamente, até dissolver completamente as fezes.



No caso de coleta tripla, a coleta deve ser feita em dias alternados.



Nosso líquido conservante especialmente formulado promove a adequada conservação das formas parasitáveis:

- Morfologia intacta,
- Segurança e Higiene,
- Sem cheiro.

▶ APRESENTAÇÃO

Paciente:
3 Amostras



Paciente:
1 Amostra



Laboratório:
3 Amostras



Laboratório:
1 Amostra



+55 11 96920 1878



+55 19 3826 6600



ATENDIMENTO@BIO-BRASIL.COM



COMERCIAL@BIO-BRASIL.COM



@BIOBRASILOFICIAL



BioBrasil