



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 11.671.812/0001-85

AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial

Maringá – PR 44 3123-8700

comercial@descarbox.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO

**COLETOR DE MATERIAIS
INFECTANTES, PERFURANTES E
CORTANTES DESCARBOX PREMIUM
REGISTRO NA ANVISA Nº 80937630001**

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria

CRQ / Pr – nº 9201624



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

1. Modelo Comercial e Imagem do produto:

- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 1,5 L - 0.750 Quilogramas 120x110x145 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 03 L - 1.500 Quilogramas 140x110x220 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 07 L - 3.500 Quilogramas 215x170x220 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 13 L - 6.500 Quilogramas 285x205x240 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 20 L - 10 Quilogramas 305x245x310 mm;



2. Nome Técnico:

- Recipiente para Perfurocortantes/Infecante;

3. Formas de Apresentação Comercial do Produto:

- Embalagem primária: 10 unidades do produto, embalados fita de arquear;
- Embalagem secundária: 20 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

4. Descrição do Produto, Especificações e Características Técnicas do Produto:

Os coletores servem para descarte de materiais infectantes perfurantes e cortantes: Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura, escalpes, lâminas de bisturi, estiletos de cateteres intravenosos (IV), agulhas para coleta de sangue espinhal ou epidural, agulha de medula óssea, para biopsia, tipo Huber ou outro tipo de agulha com lúmen. Vidros, como tubo capilar ou pipeta. Frasco de amostra, tubos de ensaio/vácuo. Descarte de fragmento ósseo/lasca de dente, osteotomos, serras, cisalhas, dispositivos de eletro cauterização Bovie, Lima, Sonda exploradora, Fórceps de extração, descolador, Lâmina para corte histológico.

O coletor 1,5 lt possui a particularidade do desconector de agulhas, em que, através do movimento de torque aplicado na seringa sobre o desconector de agulhas, a agulha é descartada no mesmo para descarte somente do perfurocortante; este procedimento destina-se a clínicas odontológicas, em que são utilizadas seringas carpule, permitido a sua reutilização pós esterilização.

5. Composição:

- Recipiente para descarte de perfurocortantes/infectantes na cor amarelo ouro;
- Coletor de papelão ondulado [onda B] na cor pardo;
- Sacola de revestimento de polietileno [PEBD];
- Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados);
- Bandeja interna de papelão ondulado [onda B];
- Acondicionado em embalagem primária caixa de papelão ondulado [onda B];
- Coletor de 1,5 Litros possui desconector de agulhas de material plástico rígido;



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br



6. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO

- Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar.
- Abra as abas superiores do coletor;
- Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico. Introduza também a Cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro
- Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
- Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
- Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
- A seguir, faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
- Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
- Utilizar descartando os materiais até o limite de enchimento;
- Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
- Travar o lacre para fechamento para descarte;
- Coletor de 1,5 L utilize o desconector para descarte de agulhas.

7. Cuidados e Precauções com o Produto

- Fabricante recomenda uso único;
- Manusear afastado do corpo;
- Não exceder o limite determinado pela linha pontilhada;
- Destruir após o uso, conforme legislação ambiental vigente;
- Não estéril;
- Validade 5 (cinco) anos;
- Classe de risco I.
- Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.

Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

- Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta. Não deixar exposto ao sol por longo tempo.
- Mantenha o coletor afastado do corpo;
- Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

8. Normas e RDC

NBR 13853-1/2018; NBR 7500/2018; NBR 5426/1985;
RDC 16/2013; RDC 222/2018
NR 32/2005
NCM 48.191.000