



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 11.671.812/0001-85

AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial

Maringá – PR 44 3123-8700

comercial@descarbox.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO

COLETOR DE MATERIAIS INFECTANTES,

PERFURANTES E CORTANTES

DESCARBOX ECOLOGIC

REGISTRO NA ANVISA Nº 80937630002

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria

CRQ / Pr – nº 9201624



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

1. Modelo Comercial e Imagem do produto:

- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 03 L - 1.500 Quilogramas 140x110x220 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 07 L - 3.500 Quilogramas 215x170x220 mm.;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 13 L - 6.500 Quilogramas 285x205x240 mm
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 20 L - 10 Quilogramas 305x245x310 mm;



2. Nome Técnico:

- Recipiente para Perfurocortantes/Infectante;

3. Formas de Apresentação Comercial do Produto:

- Embalagem primária: 10 unidades do produto, embalados fita de arquear;
- Embalagem secundária: 20 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.

4. Descrição do Produto, Especificações e Características Técnicas do Produto:

Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

Os coletores sevem para descarte de materiais infectantes perfurantes e cortantes: Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura, escalpes, lâminas de bisturi, estiletes de cateteres intravenosos (IV), agulhas para coleta de sangue espinhal ou epidural, agulha de medula óssea, para biopsia, tipo Huber ou outro tipo de agulha com lúmen. Vidros, como tubo capilar ou pipeta. Frasco de amostra, tubos de ensaio/vácuo. Descarte de fragmento ósseo/lasca de dente, osteotomos, serras, cisalhas, dispositivos de eletro cauterização Bovie, Lima, Sonda exploradora, Fórceps de extração, descolador, Lâmina para corte histológico.

5. Composição:

- Recipiente para descarte de perfurocortantes/infectantes na cor amarelo dourado;
- Coletor de papelão ondulado [onda B] na cor pardo;
- Sacola de revestimento de polietileno [PEBD];
- Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados);
- Bandeja interna de papelão ondulado [onda B];
- Acondicionado em embalagem primária caixa de papelão ondulado [onda B];



6. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO

- Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar.
- Abra as abas superiores do coletor;
- Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico. Introduza também a Cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

- Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
- Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
- Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
- A seguir, faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
- Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
- Utilizar descartando os materiais até o limite de enchimento;
- Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
- Travar o lacre para fechamento para descarte;

7. Cuidados e Precauções como Produto

- Fabricante recomenda uso único;
- Manusear afastado do corpo;
- Não exceder o limite determinado pela linha pontilhada;
- Destruir após o uso, conforme legislação ambiental vigente;
- Não estéril;
- Validade 5 (cinco) anos;
- Classe de risco I.
- Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
- Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta. Não deixar exposto ao sol por longo tempo.
- Mantenha o coletor afastado do corpo;
- Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

8. Normas e RDC

NBR 13853-1/2018; NBR 7500/2018; NBR 5426/1985;
RDC 16/2013; RDC 222/2018 - NCM 48.191.000.