



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

TORNEIRA DE 3 VIAS **MS 1.02078-20012**

Modelos: Slip / Conexão Rotativa

Componentes	Corpo da torneira	Material plástico de polipropileno
	Volante	Material plástico de polietileno de alta densidade
	Tampa com rosca	Material plástico de polietileno de baixa densidade
	Tampa sem rosca	
	Conexão rotativa	Material plástico de policarbonato
	Embalagem primária	Papel grau cirúrgico com visor transparente
	Identificação de rastreabilidade seguindo critérios da RDC nº16: Identificação individual com nº de lote, data de Fabricação e Validade, Responsável Técnica, nº da ANVISA e código de barras.	
Aplicação	Indicado para conexão de acesso intravenoso, para monitorização invasiva de pressão e administração de líquido, fármacos e retirada de amostras, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.	
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.	
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.	
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque.	
Embalagem final	Caixa de embarque contendo 2000 peças, contendo 10 caixas com 200 peças embaladas separadamente.	
Instruções de Uso	Observar a ausência de bolhas de ar previamente a instalação de fluxo no sentido arterial ou no vaso arterial. Clampear o equipamento utilizado no paciente e somente após fazer a conexão com a torneira, verificando o direcionamento da saída pelas setas localizadas no volante/manopla. Verificada a localização e a função desclampar o equipamento e continuar/inicializar o processo em uso. Manter irrigações periódicas através de uma seringa descartável com solução fisiológica. Vedar as saídas movimentando no sentido indicativo pelas setas do volante/manopla. Abrir a saída necessária ao uso movendo o volante/manopla.	
Classificação Fiscal	9018.3190	

Código de Barras	7898430461569	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS ROTATIVA – 1 UNIDADE
	7898430461576	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS ROTATIVA C/200 UNIDADE
	7898430462092	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS ROTATIVA C/2000 UNIDADE
Código de Barras	7898430461606	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS SLIP – 1 UNIDADE
	7898430461248	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS SLIP C/200 UNIDADES
	7898430462108	TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS SLIP C/2000 UNIDADES