



Rua Alexandre Dumas, 1976

São Paulo – SP – 04717-004

Tel: 0xx11 5185-9685

Fax: 0xx11 5181-8633

<http://www.bd.com/br>

<b>Razão Social Matriz</b>	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
<b>C.N.P.J Matriz</b>	21.551.379/0007-93
<b>Inscr.Estadual Matriz</b>	112.213.751.115
<b>Endereço Matriz</b>	Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas, 1976 Chácara Santo Antonio São Paulo - SP
<b>Razão Social DC</b>	Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda.
<b>C .N. P. J. DC</b>	21.551.379/0008-74
<b>Inscr.Estadual DC</b>	492.525.368.110
<b>Endereço DC</b>	Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 Parte 2 Bairro Pq Industrial Anhanguera – Osasco / SP
<b>Linha</b>	ChloraPrep™
<b>Catálogos</b>	BR 312400 - CHLORAPREP 3ML CLEAR BR 312480 - CHLORAPREP 1ML CLEAR BR 312715 - CHLORAPREP 10.5ML HI-LITE ORANGE BR 312815 - CHLORAPREP 26ML HI-LITE ORANGE
<b>Nome do produto</b>	ChloraPrep™, ChloraPrep™ Hi-lite
<b>Descrição</b>	Constituído por: Aplicador plástico de polietileno com espuma em uma das extremidades, que contém em seu interior ampola de vidro (no modelo de 26 ml são duas ampolas) contendo solução antisséptica (Gluconato de Clorexidina 2% e Álcool Isopropílico 70%), e uma espuma interna chamada de pledget, onde o corante é depositado. Os aplicadores estéreis são embalados individualmente.
<b>Apresentação</b>	1ml e 3ml sem corante demarcador 10,5ml e 26ml com corante demarcador A apresentação de 26ml contém 2 swabs
<b>Indicação de uso</b>	O produto é destinado à antisepsia da pele do paciente antes de procedimentos cirúrgicos e para manutenção dos locais de inserção dos dispositivos médicos. Para uso tópico.
<b>Precauções e Advertências para uso</b>	ChloraPrep não deve ser utilizado em pacientes recém nascidos com menos de 2 meses. Somente para uso externo e pele intactas. <b>A solução é inflamável.</b> Não realizar procedimentos com eletrocauterização ou outras fontes de ignição até que a pele esteja completamente seca.
<b>Contra-indicação</b>	Hipersensibilidade conhecida ao ChloraPrep ou qualquer um dos seus componentes, especialmente naqueles com histórico de possíveis reações alérgicas relacionadas à Clorexidina.
<b>Fabricante</b>	Carefusion
<b>Origem</b>	Estados Unidos da América
<b>Embalagem</b>	Individual, de papel grau cirúrgico e filme plástico. Esterilizado por Óxido de Etileno proporcionando abertura asséptica de transferência. Contém dados de identificação, código de barras, procedência, tipo de esterilização, nº de lote, data de esterilização, validade do produto e Registro no Ministério da Saúde, seguindo as normas de regulamentação da Anvisa.