

## FICHA TÉCNICA SMS HOSPFLEX

### 1. Identificação do Processo

Notificação ANVISA do Produto  
8047390002

### 2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

<b>Razão Social</b> RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		
<b>Endereço</b> AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO Nº 2655, UAC 07 - JARDIM IBITI DO PACO		
<b>Cidade</b> SOROCABA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18086000
<b>DDD</b> 15	<b>Telefone</b> 32124517	
<b>E-Mail</b> central.hospflex@gmail.com		
<b>Autorização de Funcionamento na Anvisa nº</b> 8.04.739-6		<b>CNPJ</b> 03.431.790/0001-58

### 3. Origem do Produto

Identificação do Fabricante Responsável:

Nome:  
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI

### 4. Dados do Produto

#### 4.1. Identificação do Produto

<b>Nome Técnico</b> Papel para esterilização	<b>Classe de Enquadramento do Produto</b> <input checked="" type="checkbox"/> Classe I
<b>Nome Comercial</b> SMS HOSPFLEX	
<b>Modelo comercial do produto:</b> Folhas com dimensões: 30 cm X 30 cm; 40 cm X 40 cm; 50 cm X 50 cm; 60 cm x 60 cm; 70 cm X 70 cm; 80 cm X 80 cm; 90 cm X 90 cm; 100 cm X 100 cm; 120 cm X 120 cm; 140 cm X 140 cm . Rolos com comprimento 300, 500 ou 1000 metros e largura 20 cm , 25 cm, 30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm e 180 cm	
<b>Formas de apresentação comercial do produto:</b> O produto estará embalado em invólucro plástico, devidamente rotulado e acondicionado em caixas de papelão (transporte) com 100 ou 500 unidades. Apresentado em Folhas com dimensões: 30 cm X 30 cm; 40 cm X 40 cm; 50 cm X 50 cm; 60 cm x 60 cm; 70 cm X 70 cm; 80 cm X 80 cm; 90 cm X 90 cm; 100 cm X 100 cm; 120 cm X 120 cm; 140 cm X 140 cm . Rolos com comprimento 300, 500 ou 1000 metros e largura 20 cm , 25 cm, 30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm e 180 cm. Disponível nas cores branca, verde e azul Composição: Não tecido TNT (SMS) 100% Polipropileno Gramatura: 60 g/m2.	

#### 4.2 Especificações do Produto

**Indicação de Uso:**

É indicado para a embalagem e proteção de produtos de uso médico-hospitalares, odontológicos e instrumentais cirúrgicos não descartáveis que necessitem ser submetidos a processo de esterilização por autoclave, óxido de etileno, formaldeído ou radiação gama, até o momento do uso.

## FICHA TÉCNICA SMS HOSPFLEX

### Princípio de Funcionamento

Tem seu funcionamento ideal para acondicionamento de produtos hospitalares, odontológicos, instrumentais cirúrgicos e outros que sofrerão processo de esterilização.

### Modo de Uso do produto:

#### Folhas

1. Separar a folha de tamanho compatível com o material a ser esterilizado.
2. Colocar a folha em uma mesa limpa e distribuir o material a ser esterilizado sobre a mesma.
3. Fechar a folha sobre o produto efetuando as dobras conforme a técnica preconizada.
4. Colocar a folha totalmente dobrada em local próprio para o material a ser esterilizado.
5. Esterilizar o material embalado.

#### Rolos:

1. Separar o rolo de tamanho compatível com o material a ser esterilizado.
2. Colocar o rolo em uma mesa limpa e desenrolar o material em quantidade suficiente para envolver o produto a ser esterilizado.
3. Cortar no tamanho adequado
4. Fechar a folha sobre o produto efetuando as dobras conforme a técnica preconizada.
5. Colocar a folha totalmente dobrada em local próprio para o material a ser esterilizado.
6. Esterilizar o material embalado.

Nota: Observar a compatibilidade do material a ser esterilizado com os métodos de esterilização que podem ser utilizados para a embalagem.

### Especificações técnicas:

#### Composição

Não tecido TNT (SMS) em 100% Polipropileno

### Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade.

Prazo de validade.

5 anos

Produto não estéril.

Descartável

### Reprocessamento

- Produto com reprocessamento proibido.

### Condições de Armazenamento

Conservar o produto em temperatura de 0°C a +40°C, umidade máxima 85% e ao abrigo da luz solar direta.

### Advertências

Material de Uso Único, Destruir Após o Uso.

### Precauções

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada.

### Contraindicações

O produto não apresenta contra-indicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo as instruções de uso.

### 4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto.

ABNT NBR 14858:2010 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar